

**Stepless**  
by *Guldmann*



Hebepattform  
LP5 & LP5+



## EINFACH ZU BEDIENEN

Die Bedienung dieser Hebeplattformen ist einfach und intuitiv und gewährleistet Rollstuhlbenutzern und Personen mit Gehschwierigkeiten ein reibungsloses Erlebnis. Beide Modelle verfügen über benutzerfreundliche Bedienpulte, die entweder eingebaut oder drahtlos sind, sodass die überwiegende Mehrheit der Benutzer die Hebeplattformen eigenständig bedienen kann.





## ZUVERLÄSSIG UND SICHER

Unsere Hebeplattformen LP5 und LP5+ sind so konzipiert, dass sie sich harmonisch in die meisten Umgebungen einfügen — sowohl in öffentliche Räume als auch in private Wohnumgebungen. Mit einer Tragfähigkeit von 360 kg und einer Hubhöhe von bis zu 830 mm sind die Plattformen die perfekte Wahl, wenn kleinere Höhenunterschiede überwunden werden müssen.

Die Hebeplattformen LP5 und LP5+ können Hubhöhen von bis zu 690 mm bewältigen, wenn sie in den Boden eingelassen sind, und bis zu 830 mm, wenn sie direkt auf der Bodenfläche installiert sind. Die Hebeplattformen sind nicht nur robust, sondern auch zuverlässig und gewährleisten eine sichere Zugänglichkeit für alle.

**Pulverbeschichteter  
Edelstahl**  
Erhältlich ist die LP5 als Standardausführung in eleganter Pulverbeschichtung mit Handlauf und Türrahmen in Anthrazitgrau.



### **Automatische Sicherheits- türen**


Vollautomatische Sicherheitstür auf der unteren und oberen Ebene (jeweils optional bzw. bei LP5+ unten Standard).

### **Plexiglas**

Alle seitlichen Abschirmungen und Sicherheitstüren sind aus Plexiglas.

### **Rampe**

Auf der unteren Ebene ist standardmäßig eine automatische Zugangsrampe enthalten, die einen einfachen Zugang und Ausstieg von der Plattform ermöglicht.

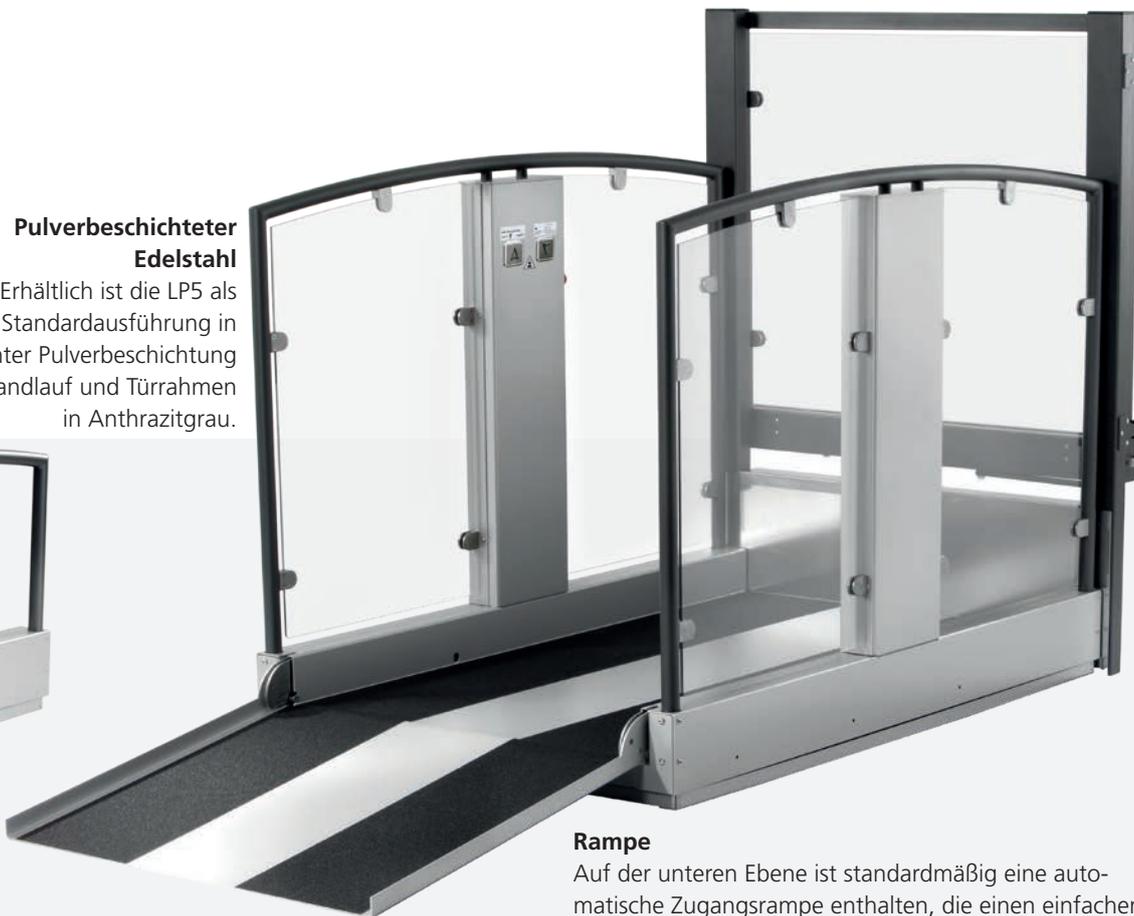

# EINSATZ IM INNEN- UND AUSSENBEREICH

Unabhängig davon, ob es sich um einen kleinen Höhenunterschied in Innenräumen oder im Freien handelt, sollte die Barrierefreiheit nicht durch den Standort eingeschränkt werden. Die Hebeplattform LP5 ist vielseitig und anpassungsfähig und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.

Alle sichtbaren Elemente sind aus Edelstahl oder sonstigem korrosionsbeständigen Material. Dadurch eignet sich diese Version der Hebeplattform für Außenbereiche.

## SICHERHEIT GEHT VOR

Ein sicherer Aufzug hat oberste Priorität. Die Hebeplattformen LP5 und LP5+ können mit grundlegenden Sicherheitsmerkmalen wie Sicherheitstüren für die obere Ebene, Ausgang nach links oder rechts und drahtloser Bedienung ausgestattet werden.

Zum Schutz der Benutzer ist die Hebeplattform mit einem Not-Stopp-Knopf ausgestattet, der durch Drücken einen sofortigen Stopp verursacht. Falls eine Notabsenkung der Hebeplattform erforderlich werden sollte, aktivieren Sie diese Funktion durch Drehen des Schlüsselschalters an der linken Seitenwand der Plattform.

Darüber hinaus sind LP5/LP5+ als Vorsichtsmaßnahme und zur Vermeidung von Fremdkörpern mit einer Sicherheitsabschirmung ausgestattet, die den gesamten Hebebereich abdeckt.

Je nach lokalen und nationalen Vorschriften können unterschiedliche Regeln in Bezug auf Hubhöhe und Abschirmung gelten.



# WIR UNTERSTÜTZEN SIE – SCHRITT FÜR SCHRITT






Die Suche nach barrierefreien Lösungen kann komplex sein, aber wir sind hier, um den Prozess zu vereinfachen. Wir beraten Sie gerne zu den spezifischen Anforderungen konkreter Projekte, wir nehmen vor Ort Inspektionen Ihrer Installation vor und wir suchen die beste Lösung für Sie. Wir können Ihnen helfen, die Einhaltung der Barrierefreiheitsanforderungen für Ihr Projekt sicherzustellen.

Unsere Hebeplattformen LP5 und LP5+ sind nicht nur einfach zu installieren, sondern verfügen auch über ein Expertenteam, das Sie bei jedem Schritt unterstützt. Die Installation selber nehmen kompetente Monteure vor – und da die LP5/LP5+ keine baulichen Maßnahmen wie etwa Vertiefungen im Boden erfordert, ist der Prozess sehr schnell und in der Regel nach nur einem Tag abgeschlossen.

Die LP5/LP5+ hat einen sehr geringen Wartungsbedarf, da es sich um eine einfache und robuste Technologie handelt. Dennoch sind Wartung und Instandhaltung der Hebeplattform wichtig und wir empfehlen eine Servicevereinbarung entweder direkt mit Stepless by Guldmann oder mit einem zertifizierten Stepless-Händler.




# TECHNISCHE DATEN

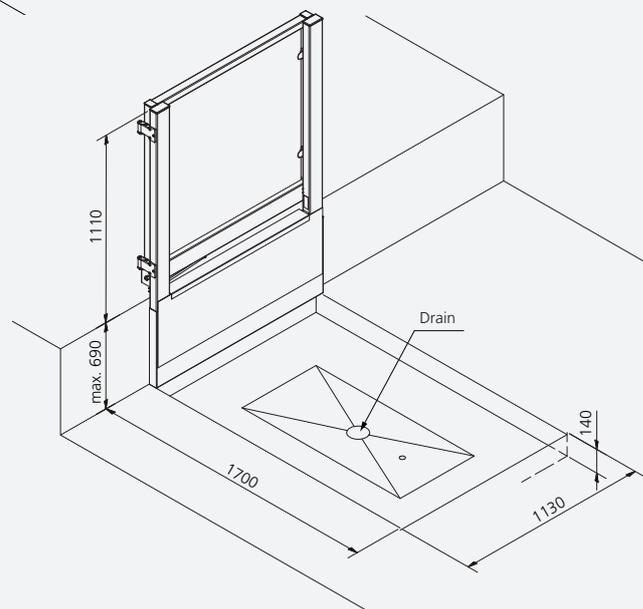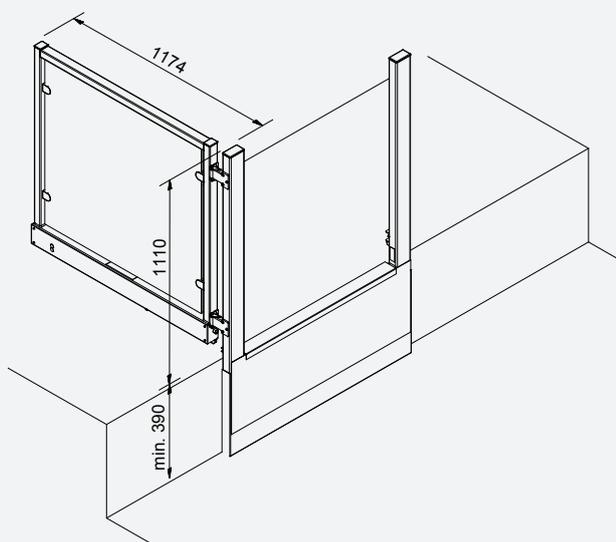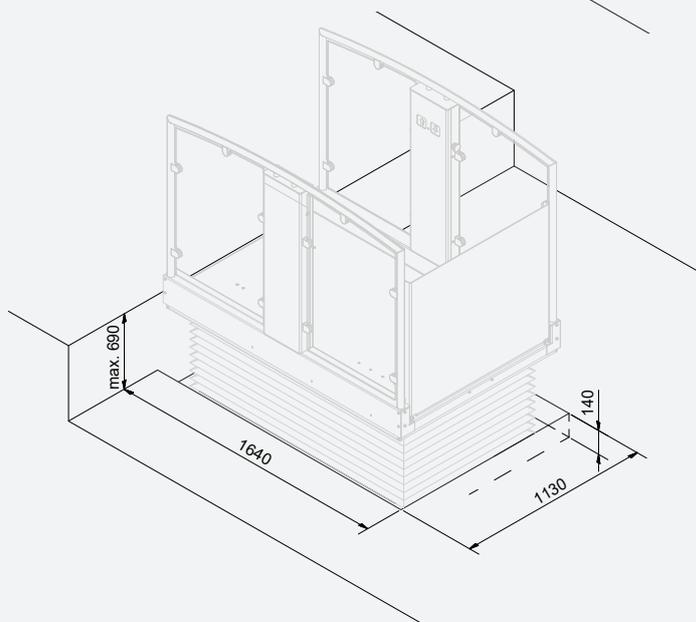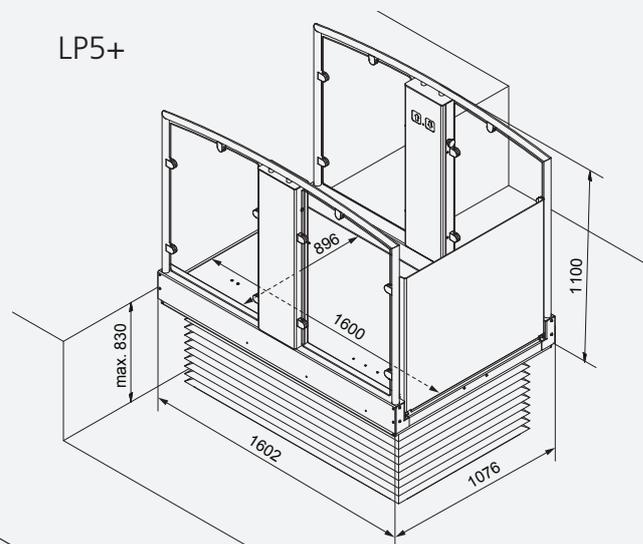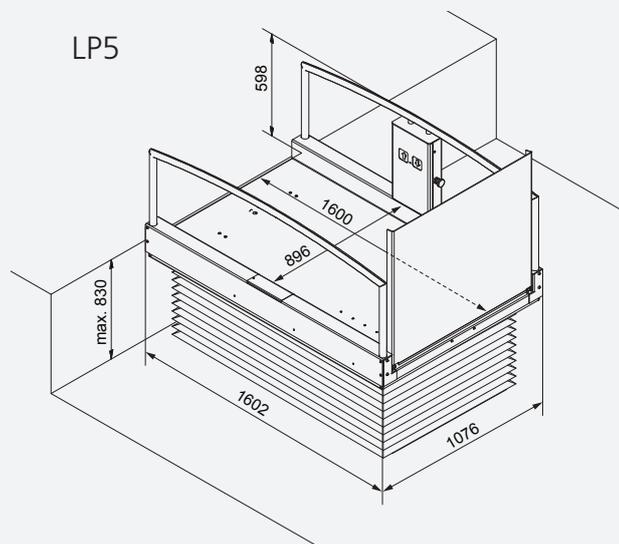

	LP5	LP5+
<b>Funktionen</b>		
Tragfähigkeit	360 kg	
Hebegeschwindigkeit	13 mm/sek.	
Hubhöhe		
Min.	140 mm	
Max.	830 mm	
<b>Bedienung</b>		
Elektrisch	Taster (berührungssensitiv)	
Notschaltung	elektronisch	
Notabsenkung	mechanisch	
Klemmsicherung	mechanische/elektrische Klemmleisten	
Einsatz	Außen-/innenbereich	
Nutzbare Plattformgröße	890 x 1580 mm	
<b>Gewicht</b>		
Eigengewicht	118 kg	150 kg
Sicherheitstür	76 kg	
<b>Materialien</b>		
Materialien	Aluminium	
Materialien	Pulverlackierter/Elektroverzinkter Stahl	
Geländer	Aluminium und klares Polycarbonat	
Sicherheitstür	Pulverbeschichteter Stahl und gehärtetes Sicherheitsglas	
Deckplatte, Sicherheitstür	Galvanisierter Stahl	
Weißaluminium	RAL 9006	
Anthrazitgrau	Bleu 600 sablé (am Geländer)	
<b>Elektronik</b>		
Ein-/Ausschalten	automatisch	
Stromverbrauch		
Stand-by	3 W	
Betrieb	14,7 W	
Intermittens	10/90	
Sicherung	T10A	
Batterien	2 x 12V/4,5 Ah Gasdicht und wartungsfrei	
Stromversorgung		
primär	230 V/115 V	
sekundär	24 V DC	
<b>Anwendungsgebiet</b>		
Außen- und Innen- Installation Temperatur	-10°C - +40°C (Bei Temperaturen unter 0°C wird eine geeignete Erwärmung unter der Plattform empfohlen)	
<b>Schutzklasse</b>		
Komponenten	IP 65	
Bedienungstafel	IP 67	
Sicherheitstür Komponenten	IP 65	
<b>Zubehör</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Externer Befehlsgeber</li> <li>- Funksteuerung</li> <li>- Sicherheitstür</li> <li>- Handbedienung mit Spiralkabel</li> <li>- Ausfahrt linke / rechte Seite</li> </ul>	

Kennzeichnung	
	Das Produkt wird nach Übereinstimmung der Richtlinie 2006/42/EG des Rates vom 17. Mai 2006 hergestellt.
Klassifizierung	
gemäß ISO 9999	18 30 06

Artikel-Nr./Modell	
<b>LP5</b>	
13050-101	LP5, Standard, mit 800 mm Rampe
13050-102	LP5, für Einbau in Grube, mit 150 mm Rampe
13050-111	LP5 mit seitlichem Ausgang, rechts
13050-221	LP5 mit seitlichem Ausgang, links
<b>LP5+</b>	
13056-101	LP5+, Standard, mit 800 mm Rampe
13056-102	LP5+, für Einbau in Grube, mit 150 mm Rampe
13056-111	LP5+ mit seitlichem Ausgang, rechts
13056-112	LP5+ für Einbau, mit seitlichem Ausgang, rechts
13056-221	LP5+ mit seitlichem Ausgang, links
13056-222	LP5+ für Einbau, mit seitlichem Ausgang, links
<b>LP5 / LP5+</b>	
130590	Sicherheitstür, vollautomatisch, links montiert (gesehen von der oberen Haltestelle DIN links)
130595	Sicherheitstür, vollautomatisch, rechts montiert (gesehen von der oberen Haltestelle DIN rechts)
1305901	Ausfahrt für LP, breit, linksanschlagend
1305951	Ausfahrt für LP, breit, rechtsanschlagend

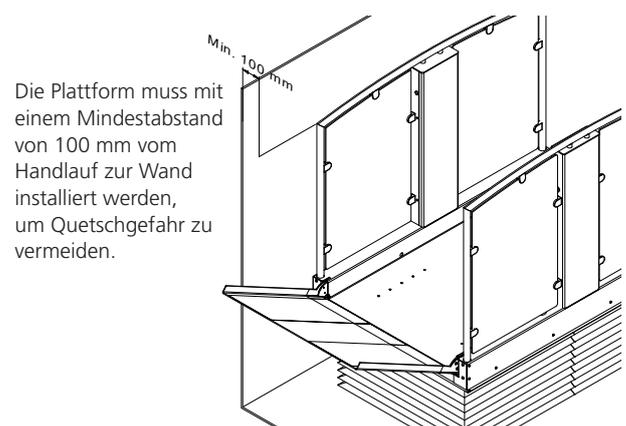

# Stepless™

by *Guldmann*



**V. Guldmann A/S**  
Hauptsitz:  
Tel. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.stepless.com

**Guldmann GmbH**  
Tel. +49 611 974 530  
info@guldmann.de  
www.stepless.de