

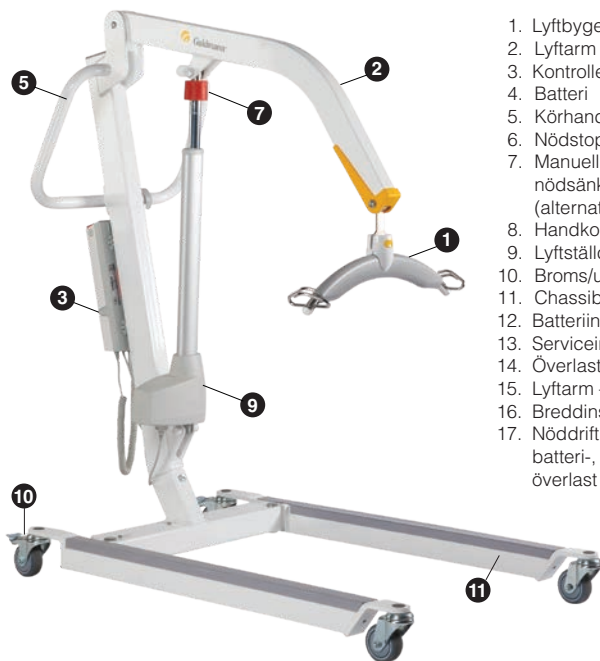


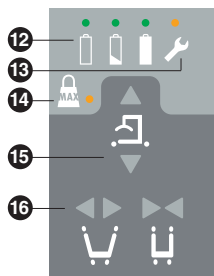

Snabbguide – GL5.2 mobil personlyft

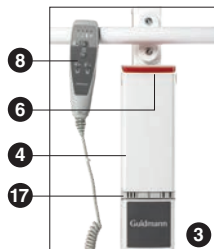

1. Lyftbygel
2. Lyftarm
3. Kontrollenhet
4. Batteri
5. Körhandtag
6. Nödstopp
7. Manuell nödsänkning (alternativ)
8. Handkontroll
9. Lyftställdon
10. Broms/utlösare
11. Chassisen
12. Batteriindikator
13. Serviceindikator
14. Överlast indikator
15. Lyftarm – upp/ned
16. Breddinställning
17. Nöddrift: upp/ned, batteri-, service- och överlast indikator

Checklista före användning


- Kontrollera att personlyften kan köras obehindrat.
- Kontrollera att bromsfunktionen (10) på hjulen fungerar.
- Kontrollera att lyftarmen (2) kan höjas och sänkas med hjälp av handkontrollen (8).
- För att byta riktning på lyft eller benspridning måste knapp släppas upp innan nästa knapp trycks ner.
- Kontrollera att breddinställningen (16) kan justeras (öppnas/stängas) med hjälp av handkontroll (8).
- Kontrollera nödfunktionen upp/ner genom att trycka på knapparna (17) på manöverboxen (7). Kontrollera den manuelle nödsänkningen (7) genom att vrida den i pilens riktning.
- För att frigöra nödstoppet se bilder nästa sida. Använd tummen och pekfingeret/mellanfingeret att

trycka på knapparna på batteriets sidor och dra ut batteriet. För att installera batteriet igen, styr batteriboxen på styrstiftet och tryck på plats.

- Se till att lyftbygeln kan svänga fritt (1) och kontrollera att lyftbygeln är ordentligt fäst vid lyftarmen (2).

Uppladdningsmöjligheter

- Inbyggd laddare i kontrollenheten – koppla kabeln till stickkontakten.
- När kabeln är inkopplad i en påslagen stickkontakt lyser den gröna lysdioden på kontrollenheten (3).
- Den gröna lysdioden på kontrollenheten (3) lyser när batteriet laddas. När batteriet är fulladdat lyser 3 gröna dioder.
- Efter att strömkabel kopplats bort från elnätet kan lyften användas. Vid gul lampa lyftfel/nödstopp aktiverat.

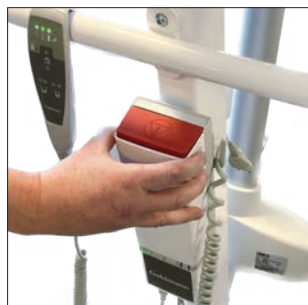

Håll in grå knappar.



Dra rak ut.



Tryck tillbaka.

Indikeringslampor och ljudsignaler

Status	Indikatorlampor	Ljudsignaler	Möjliga GL5.2-signaler			
			Upp	Ned	Benbredd	Nödsänkning
Manöverdosa						
Batterinivå 75-100 %	3 gröna lampor		x	x	x	x
Batterinivå 50-75 %	2 gröna lampor		x	x	x	x
Batterinivå <50 %	1 grön lampa		x	x	x	x
Kritiskt låg batterinivå, två cykler kvar	1 gul lampa	Piper vid knappaktivering	x	x	x	x
Service för lyftanordning	Gul. Tänds under användning och 2 minuter efter		x	x	x	x
Överbelastning	Gul. Blinkar 3 gånger + lyser upp i 10 sekunder			x		x
Kontrollbox						
Laddare	Grön blinkande					
Laddad	Grön fast					

Daglig rengöring och underhåll

Rengör produkten med en fuktig trasa och vanligt rengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel som innehåller kraftigt sura eller basiska ämnen eller alkohol. Se ev. bruksanvisningen.





Skanna här för bruksanvisning
m.m. om användning av GL5.2.

Tillbehör

Lyftbygeln

Selens lyftband placeras i krokarna. Vid lyft, kontrollera att lyftbanden blir kvar i korrekt position i lyftbygelns krok.

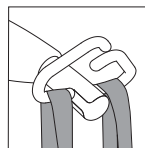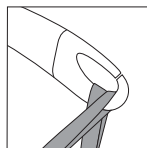

| Time to care |

Kontakta Guldmann på:

Kundservice: 0322-55290

info@guldmann.se