

Utprovningsprotokoll Basic Comfort High

Guldmann™

Brukare:

Ordinatór:

Lyftsele / Modell:

Storlek:

Spacer/Nät Polyester Engångs

ID-nummer:

Datum: /

Armarnas placering

	Utanför	Innanför	Kommentar
Höger			
Vänster			

Benstödens koppling

Korsade

Omlott

Kommentar

Benstödens placering under låren

Kommentar

Lyftbandens koppling till lyftbygel

Ryggband höger

Färg:

Benstöd höger

Färg:

Ryggband vänster

Färg:

Benstöd vänster

Färg:

Förlängningsband

20 cm

Rygg hö

Rygg vä

Benstöd hö

Benstöd vä

30 cm

Rygg hö

Rygg vä

Benstöd hö

Benstöd vä

Kommentar

Lyftbygel modell

Omlott

X-bygel

H-bygel

Lyftbygel bredd

34 cm

44 cm


53 cm

Kommentar

Annat tillbehör

Nackstöd

Övriga kommentarer

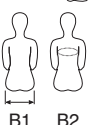

Riktlinjer vid val av storlek på selen

Alla mått anges i cm

	Kids	Kids	Kids	Kids	Kids	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
	2 - 4	4 - 6	6 - 10	10 - 14	10 - 16									
H		45 - 60	55 - 70	55 - 70		75 - 82	80 - 87	85 - 92	90 - 97	95 - 102	95 - 102	95 - 102	95 - 102	95 - 102
B1		25 - 30	28 - 35	28 - 35		33 - 37	36 - 40	39 - 43	42 - 45	45 - 49	48 - 52	54 - 58	57 - 63	62 - 57
B2 ^{xj}		55 - 90	60 - 95	65 - 100		70 - 105	75 - 110	80 - 120	90 - 130	100 - 140	110 - 150			
B1	46 - 54	50 - 65	51 - 72		56 - 75									
B2 ^{xxj}														



Baskoppling alt. 1

Gör en ögla av bendelarnas röda band. De inre korta grå lyftbanden ska sedan träs genom den röda ögla.



Baskoppling alt. 2

De inre korta grå banden korsas genom varann. De yttre långa grå banden träs genom de korta inre grå bandet. "Lång genom kort ögla".



Omlottkoppling



Omlottkoppling

Applicera bendelarna omlott. Trä de yttre långa grå banden genom de korta inre grå banden. "Lång genom kort ögla".