

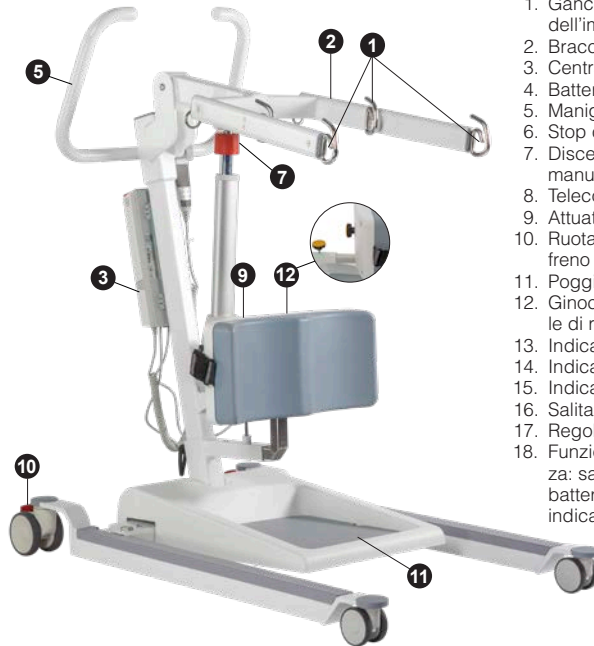


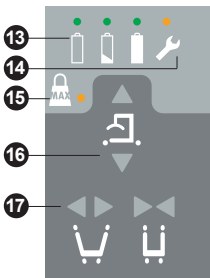

Guida rapida - GLS5.2 Sollevatore attivo

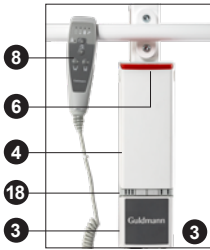

1. Ganci di fissaggio dell'imbragatura
2. Braccio di sollevamento
3. Centralina di controllo
4. Batteria
5. Maniglione di spinta
6. Stop d'emergenza
7. Discesa di emergenza manuale
8. Telecomando
9. Attuatore
10. Ruota posteriore con freno
11. Poggiapiedi
12. Ginocchiere e manopole di regolazione x 2
13. Indicatore batteria
14. Indicatore Service
15. Indicatore sovraccarico
16. Salita / Discesa
17. Regolazione della base
18. Funzioni di emergenza: salita / discesa, batteria, service o indicatore sovraccarico

Elenco controlli a cura dell'operatore prima dell'utilizzo

- Verificare che le ruote del sollevatore si muovano liberamente.
- Azionare i freni (10) per verificare che funzionino.
- Sollevare ed abbassare il braccio di sollevamento attraverso il pulsante di controllo (16) sul telecomando (8).
- Verificare che la base si apra e chiuda correttamente (17) con il telecomando (8).
- Verificare le funzioni di emergenza salita / discesa premendo il pulsante (17) sulla centralina di controllo (3). Verificare le funzioni manuali girando la manopola (7) in direzione della freccia.
- Per resettare lo stop d'emergenza, togliere la batteria spingendo i pulsanti sul lato della stessa, estrarre la batteria e reinserirla nuovamente nella

corretta posizione. Come da fotografia alla pagina seguente.


- Rilasciare le manopole di regolazione del poggiapiedi. Il poggiapiedi dovrebbe muoversi verso l'alto/basso e scorrere dentro/fuori, quindi stringere per bloccare.
- Assicurarsi che il poggiapiedi (11) sia ben saldo e pulito.

Opzioni di ricarica

- Il caricabatteria è integrato nella centralina di controllo – inserire il cavo di rete nella presa di corrente.
- Quando l'alimentatore è inserito, la luce verde sulla centralina di controllo si accende.
- Durante la ricarica sulla control box si accenderà la luce verde; quando la carica è completa si illumineranno 3 luci verdi.



Spingere il pulsante grigio.

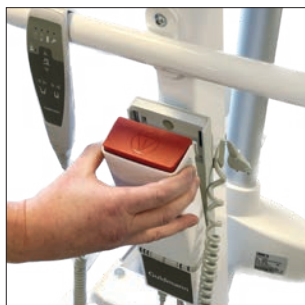

Estrarre.



Riposizionare correttamente.

Indicatori luminosi e avvisi audio

Stato	Spie luminose	Segnali acustici	Possibili segnali GL5.2			
			Su	Giù	Apertura della gamba	Abbassamento di emergenza
Telecomando						
Livello batteria 75-100%	3 luci verdi		x	x	x	x
Livello batteria 50-75%	2 luci verdi		x	x	x	x
Livello batteria < 50%	1 luce verde		x	x	x	x
Livello basso critico batteria, due cicli rimasti	1 gialla verde	Bip alla pressione del pulsante	x	x	x	x
Guasto sul sollevatore	Giallo. Si accende durante l'utilizzo e rimane accesa per due minuti successivi		x	x	x	x
Sovraccarico	Giallo. Lampeggia 3 volte + si accende per 10 secondi			x		x
Scatola dei comandi						
Caricatore	Verde - lampeggia					
Caricato	Verde					

Pulizia quotidiana e manutenzione

Pulire con un panno umido e un detergente che non sia troppo aggressivo né che contenga alcool. Vedere manuale.




Scansiona il codice per il manuale utente del GLS5.2.

Accessori

Barra di presa

Posizionare l'imbragatura nei ganci. Dopo il sollevamento assicurarsi che la cinghia dell'imbragatura si mantenga in posizione.

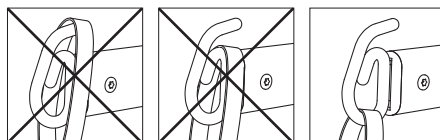

| Time to care |

Per contattare Guldmann rivolgersi a:

Ufficio vendite: +39 0521 660132

italia@guldmann.com

Assistenza clienti: areatecnica@guldmann.com