


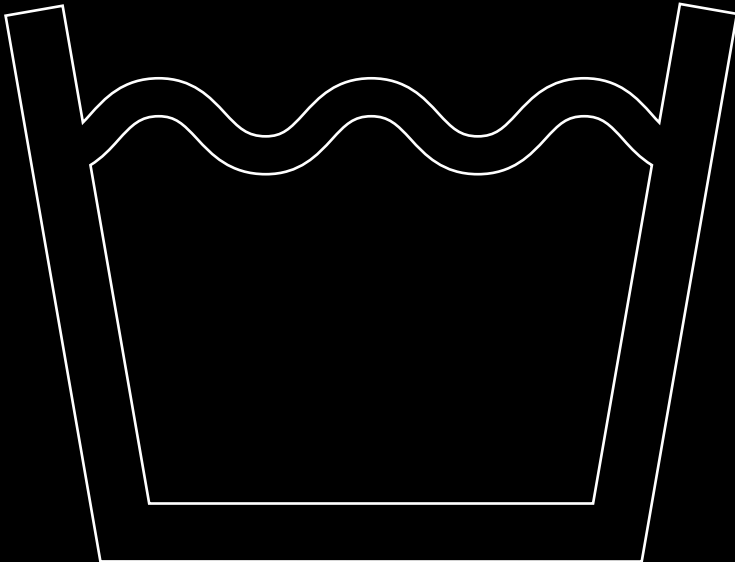

DK Guldmann sejl – Rengøring og desinfektion 2

Manual – vers. 2.00

CE



Guldmann™

1.00

Guldmann sejl – Rengøring og desinfektion

Guldmanns genanvendelige og vaskbare sejl er beregnet til personlig brug til én enkelt bruger. For at sikre optimal infektionskontrol bør sejlet rengøres, når det bliver snavset, eller når en bruger ikke længere har behov for det, før det samme sejl bruges til en ny person.

Detaljerede rengøringsinstruktioner findes på produktetiketten.

Bemærk, at manglende overholdelse af disse instruktioner kan medføre bortfald af garantien og forkorte sejlets levetid.

1.01

Rengøring



Tåler normal maskinvask ved angiven temperatur



Tåler ikke blegemidler



Tåler tørring i tørretumbler ved lav temperatur, maks. 60° C.



Tåler ikke stryging

1.02

Desinfektion

Guldmann anbefaler termisk desinfektion som den mest effektive metode til rengøring af sejl. For at sikre en korrekt termisk desinfektion bør sejlet vaskes i henhold til følgende tids- og temperaturanbefalinger:

- Skyl først med koldt vand inden vask med varmt vand, da høje temperaturer kan forårsage mørke pletter på områder med snavs.
- Anvend en vaskecyklus på 10 minutter ved 80 °C med et godkendt vaskemiddel, der har en neutral pH-værdi.

(Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR))

<https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infektionshygiejne/retningslinjer/nir/nir-desinfektion.pdf?la=da>

(Centers for Disease Control and Prevention (CDC))

https://www.cdc.gov/healthcare-associated-infections/hcp/cleaning-global/appendix-d.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/hai/prevention/resource-limited/laundry.html

Hvis sejlet indeholder ikke-porøse plastdele, anbefales det at anvende desinfektionsservietter med op til 85 % isopropyl alkohol/opløsning eller en fugtig klud med varmt vand og et desinficerende rengøringsmiddel, såsom en kloropløsning med en koncentration på op til 1500 ppm.

Efter vask og før brug af sejlet skal man kontrollere det for slitage og skader.

Vær opmærksom på tegn på slitage og defekter på sejlene, og tag dem ud af brug, hvis nogle af følgende problemer observeres på stropperne og/eller selve stoffet:

1. Mærker efter kemikalier/ætsende stoffer.
2. Hvis en del, uanset hvilken, er smeltet eller svedet.
3. Sejlet har udtrukne tråde, huller, rifter eller hak.
4. Ødelagte eller slidte syninger
5. Etiketten på sejlet mangler, er ulæselig eller ufuldstændig.
6. Der er knuder et eller flere steder på sejlet.
7. Slitage
8. Andre synlige skader, der medfører tvivl om sejlets styrke.

Se manualen for sejlet eller besøg www.guldmann.dk for en mere detaljeret vejledning og en tjekliste til inspektion af sejl.

Eksempler på defekte sejl:*Brudte syninger**Knuder**Flosset/trævlet jord**Smeltede/svedne områder*

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk