



Trainer Module

Loftlift med dynamisk vægtaflastning

En GH3+ loftlift, der er udstyret med Trainer Module, er ikke blot en perfekt løfte- og forflytningsløsning. Den giver også mulighed for at forbedre patientens mobilitet og fysiske funktion gennem sikre og vægtaflastede genoptræningsøvelser på stuen.


Når Guldmann Trainer Module er aktiveret vil GH3+ understøtte patientens vægt dynamisk, og patientens kropsvægt kan aflastes med op til 100 kg.

Modulet har en kapacitet på op til 30 minutters brug, når loftliftens batteri er fuldt opladet. Efter 30 minutter vil Trainer Modulet automatisk slukke. Herefter er liften med det samme klar til løft og forflytning, og opladningen genoptages.

Guldmann Trainer Module startes, styres og overvåges via den digitale håndbetjening. Det fremgår tydeligt, når modulet er aktiveret. LCD-skærmen på håndbetjeningen viser det antal kg, der aflastes med samt den resterende træningstid.



Transfer Treatment Training

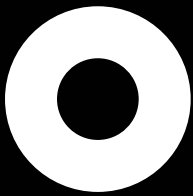

Ét system – mange muligheder

Trainer Module føjer endnu en funktion til de mange anvendelsesmuligheder, som Guldmanns loftlifte byder på ud over at løfte op og ned.

Med Trainer Module er det muligt at påbegynde rehabilitering med dynamisk vægtaflastning allerede på patientens stue.

Hænderne fri – fokus på kvaliteten i træningen

Funktionelle mobilitets- aktiviteter med dynamisk vægtaflastning:

- Overgang fra en stilling til en anden
- Balance – stående / siddende
- Gang på/over forhindringer
- Stående øvelser som: vægtforskydning, stå på et ben
- Blide squats
- ADL træning

Typiske genoptræningsøvelser med dynamisk vægtaflastning:

- Gang på/over forhindringer
- Gangtræning
- Balancetræning
- Siddende-til-stående
- Squat og lounges
- ADL træning

En unik løsning – simpel og fleksibel

- Op til 100 kg vægtaflastning i trin på 1 kg
- Træningssessioner på op til 30 minutter
- Forebyggelse af fald
- Nem at anvende
- Loftliften kan bruges til løft og forflytning, når den ikke anvendes til træning
- 1 times opladning = 10 minutters træningstid

Patentanmeldt



| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk