



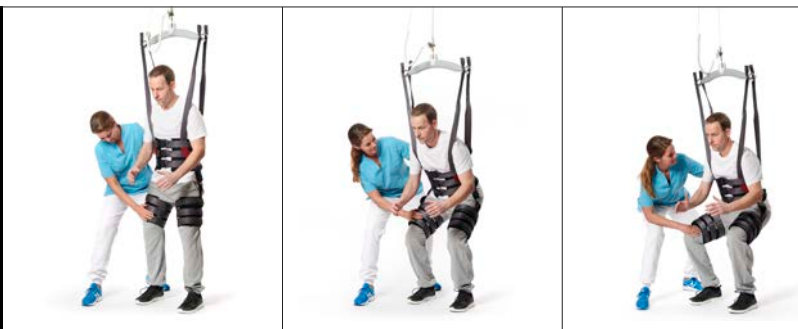

Quick Guide – Trainer Module

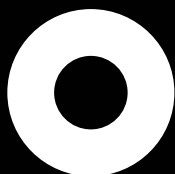


Når brugeren er klar til at påbegynde træningen, aktiveres løftemodulet ved tryk på en hvilken som helst knap på håndbetjeningen, hvorved Guldmann logoet kommer til syne. Klik på knappen **"Menu"**.




Tryk på → indtil menuen **"Trainer"** vises i displayet.




Vælg **"Start"** i menuen Trainer.

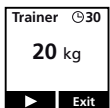

Trainer modulet viser nu en vægt i kg.

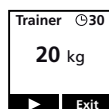


Når vægtaflastningen er valgt, startes træningen ved et tryk på venstre menuknap "►".

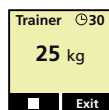

Automatisk vægtaflastning aktiveres, og træningen er i gang. Dette indikeres med et gult display. Brugeren kan nu gennemføre øvelserne med vedkommendes valgte vægt aflastet.


Vægten kan justeres efter behov under træningen ved hjælp af op/ned-pilene på håndbetjeningen. Justeringen sker i intervaller à 1 kg.



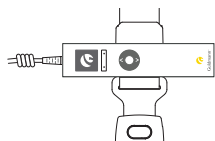


Hvis der er behov for håndfri betjening, kan håndbetjeningen clipses på holderen på stroppen. Håndfri betjening giver terapeuten frie hænder til at hjælpe brugeren under træningen og forhindrer, at ledningen snor sig om stroppen og evt. beskadiges.

Placer **IKKE** håndbetjeningen på ophængsbojlen: Ledningen vil sno sig om stroppen!

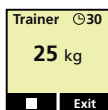

Hvis du vil afbryde den automatiske træningsfunktion og vende tilbage til almindelig "trykaktivering", skal du aktivere én af de to menuknapper "■" eller "Exit" under displayet (begge knapper kan bruges).

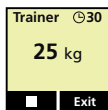

Når træningen er slut: Vælg "Exit" for at forlade Trainer modulet – loftliften fungerer nu som normalt (til løft og forflytning).



**Scan her for bruger-
manual m.m. vedrørende
brug af GH3 loftlift.**

Fejlmeddelelser



Dynamisk vægtaflastning overbelastet. Tilladt dynamisk vægtaflastning maks. 100 kg. Reducer belastningen for at aktivere dynamisk tilstand.



Dynamisk vægtaflastning utilstrækkeligt belastet. Tilladt dynamisk vægtaflastning min. 5 kg. Belast stroppen for at aktivere dynamisk tilstand.



Øvre eller nedre grænse er nået. Sørg for, at der ikke er noget, der aktiverer den øverste grænseafbryder, og at stroppen er viklet helt ud.



Batteriniveau lavt. Indikerer, at der er mindre end 60 sekunders træningstid til rådighed.



Batteriniveau kritisk. Trainer modulet lukker ned.



Tidsindikator. Indikerer resterende træningstid i minutter.



Træningstiden er mindre end 1 minut eller er overskredet.