



Quick Guide – GH3+ Klasse III Vægt



Nulstilling af vægten


Tænd for hejset ved at trykke på en vilkårlig taste på håndbetjeningen.




Vægtfunktionen vælges ved at vælge "menu". Når der skal vælges funktioner i displayet bruges funktionsknapperne under displayet.



"Vægt klasse III" vises i displayet. Tryk på "start".

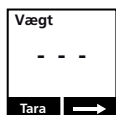


Tre streger blinker indtil vægten finder sit nulpunkt.

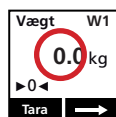

Når displayet viser "0.0" monteres løftesejlet på løftebøjlen. Lad bøjle og sejl hænge frit og husk ikke at trække i håndbetjeningens ledning. Dette vil påvirke vejningen.



Når "kg" vises i displayet er vægten klar til at blive nulstillet. Dette gøres ved at vælge "Tara"

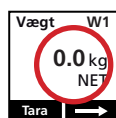

Displayet viser nu igen "0.0" og "net" vises under "kg". Vægten er nu klar til at veje patienten.





Vejning

Sørg for at vægten er nulstillet korrekt inden vejning (se forrige afsnit).



Løftesejlet tages af bøjlen. Når løftesejlet er pålagt brugeren monteres det igen på løftebøjlen. Brugeren løftes.



Den korrekte vægt kan aflæses, når der står "kg" på displayet.



Når vejningen er færdig trykkes "Exit" for at komme tilbage til startmenuen.

Vejeområder




Klasse III vægten arbejder i to vejeområder - W1 og W2. Hvilke område, der vejes i, vises på displayet.

W1 viser vægt op til 200 kg med en usikkerhed på 100 g og W2 viser vægt over 200 kg med en usikkerhed på 200 g.


Fejlmeddelelser



Vægten er overbelastet

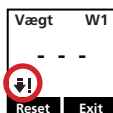

Vægten er under mindste mulige aflæsning

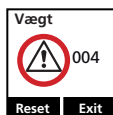

Der er en fejl i vægten. Kræver servicetekniker.



Scan her for brugermanual
m.m. vedrørende brug af GH3.

| Time to care |

Kontakt Guldmann på:

Salg: +45 8741 3100
salgdk@guldmann.com

Service: +45 8741 3191
service@guldmann.com