


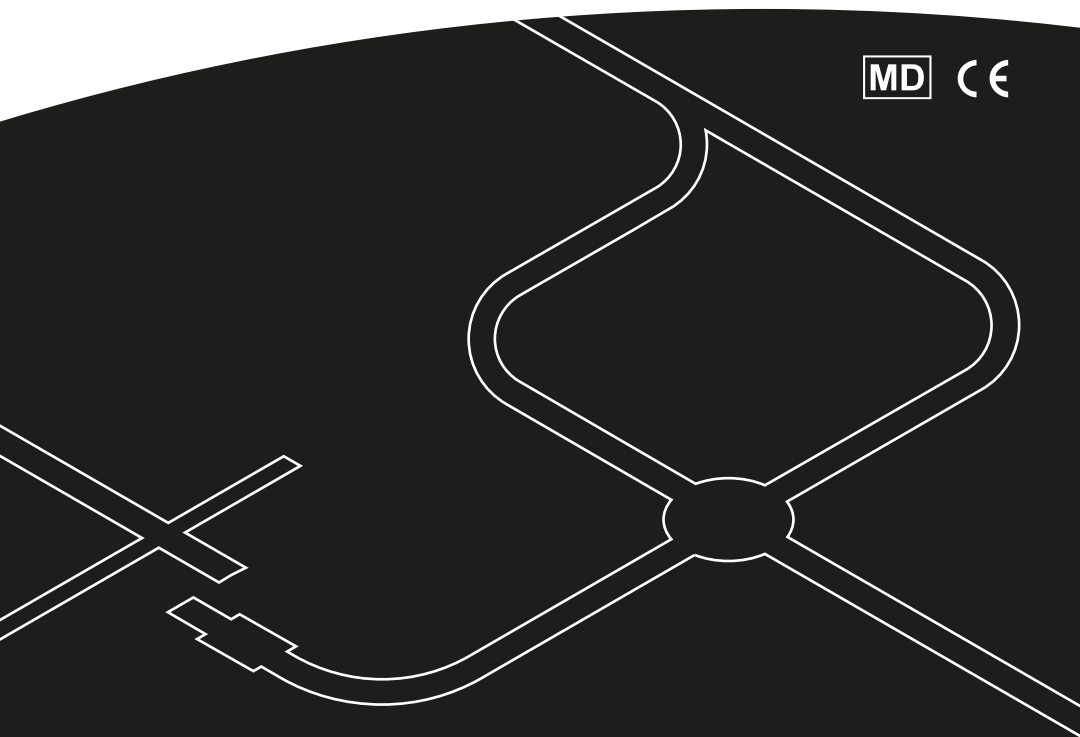

DKFritstående skinnesystem, justerbart

Bruger manual – vers. 101.00



Guldmann™

Fritstående skinnesystemer, justerbare

Varenr.:

553000

556000

556297

1.00	Formål og anvendelse	3
1.01	Producent	3
1.02	Erklærede formål	3
1.03	Anvendelsesområde	3
1.04	Betingelser for anvendelse	3
1.05	Vigtige forholdsregler	3
1.06	Løftemoduler fra andre producenter	4
1.07	Udpakning	4
1.08	Opstilling af systemet	5
2.00	Beskrivelse af funktioner	9
2.01	Betjening	9
2.02	Længde- og højdejustering	9
3.00	Demontering og transport	9
3.01	Demontering af systemet	9
3.02	Transport af systemet	10
4.00	Vedligeholdelse og opbevaring	10
4.01	Rengøring	10
4.02	Opbevaring	10
4.03	Vedligeholdelse	10
5.00	Service og levetid	10
5.01	Levetid	10
5.02	Sikkerheds-/serviceeftersyn	11
5.03	Fejlfinding	11
6.00	Mærkning	12
7.00	Tekniske specifikationer	13
8.00	EU-overensstemmelseserklæring	14
9.00	Erklæring om miljøpolitik - V. Guldmann A/S	14
10.00	Garanti og servicevilkår	14
A.	Garanti	14
B.	Service eller reparation	15

1.00**Formål og anvendelse**

1.01**Producent**

V. Guldmann A/S
Graham Bells Vej 21-23A
DK-8200 Aarhus N
Tel. + 45 8741 3100

1.02**Erklærede formål**

Fritstående systemer er beregnet til at understøtte loftflifte i flytbare systemer, der ikke er ophængt i en bygning eller konstruktion.

1.03**Anvendelsesområde**

Skinnesystemet er egnet til brug på plejehjem, rehabiliteringscentre, institutioner og i private hjem.

1.04**Betingelser for anvendelse**

Det fritstående skinnesystem bruges sammen med et løftemodul.

Det fritstående skinnesystem er et transportabelt skinnesystem, der kan opstilles stort set overalt og ikke kræver nogen form for montering på vægge, lofter eller gulve.

Det fritstående skinnesystem kan justeres i længden og højden.

1.05**Vigtige forholdsregler**

Læs hele brugermanualen, inden det fritstående skinnesystem opstilles og tages i brug.

- Det fritstående system kan opstilles og tages ned af en enkelt person.
- Den maksimale belastning på 255 kg må ikke overskrides.
- Hvis det fritstående skinnesystem beskadiges, skal det straks tages ud af brug.
- Det fritstående skinnesystem skal opstilles på et plant underlag.
- Endestoppene skal monteres korrekt og låses med rørstift, og de 2 gule fingerskruer på de øverste beslag skal spændes ordentligt, inden systemet tages i brug.
- Det fritstående skinnesystem må ikke bruges til andre formål end de, der er angivet i denne brugermanual, dvs. hverken som legeplads eller gyngestativ.
- Enhver alvorlig hændelse som opstår i forbindelse med brug af dette produkt, skal rapporteres til producenten samt den lokale myndighed.

1.06

Løftemoduler fra andre producenter

Guldmann fraskriver sig ansvar for fejl eller ulykker, der opstår ved brug af personløftere/løftemoduler fra andre producenter.

1.07

Udpakning

Kontrol inden udpakning


Er emballagen beskadiget ved modtagelse, skal delene til det fritstående skinnesystem nøje undersøges for synlige skævheder, defekter eller mangler.


Er der mistanke om beskadigelse, må det fritstående system ikke samles eller tages i brug, før systemet er blevet godkendt af kvalificeret servicepersonale eller Guldmann Service Team.

Udpakning


Udpak de 3 kasser, der indeholder:

- Topbeslag og skinnemodul (1 stk.)
- Lodret stolpemodul (2 stk.)
- Brugermanual
- 5 mm 6-kant nøgle

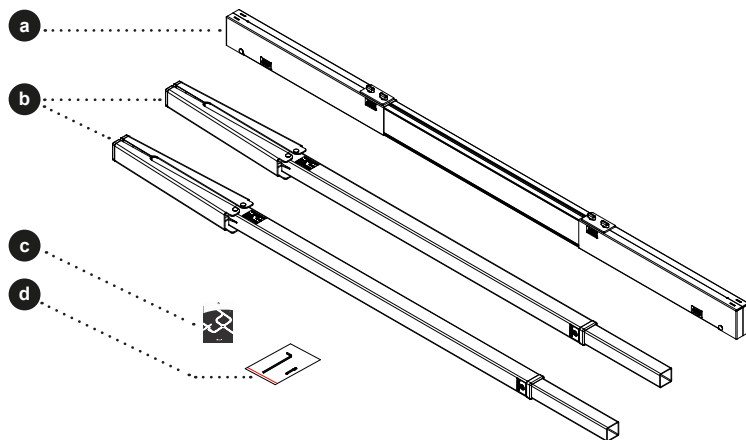


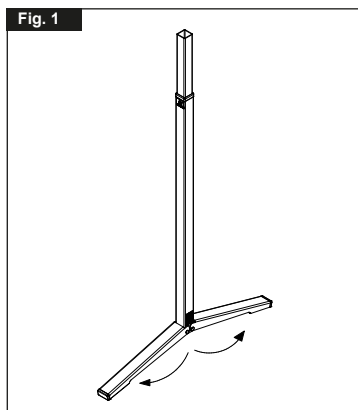


Stil et lodret stolpemodul op.

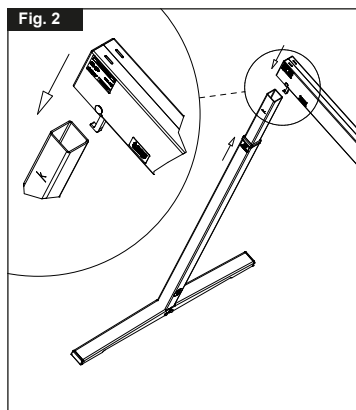


Løft topbeslaget og skinnemodulet, og monter det oven på det lodrette stolpemodul. Topbeslaget skal ned så det flugter mærket på den lodrette stolpe.

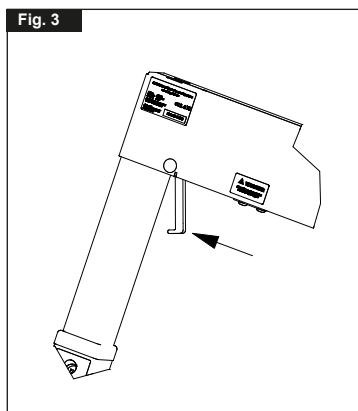


Lås topbeslaget fast til den lodrette stolpe med låsearmen.

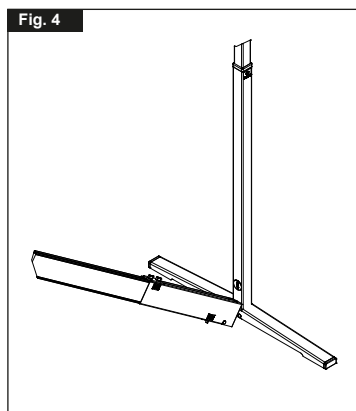


Stil det andet lodrette stolpemodul op.

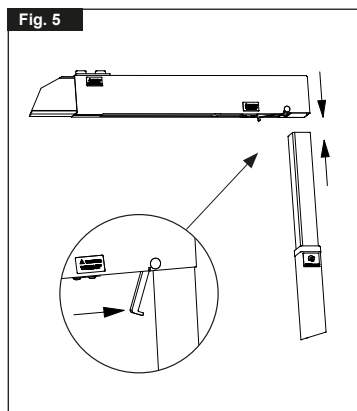


Løft topbeslaget og skinnemodulet, og monter det oven på den lodrette stolpe. Lås med låsearmen.

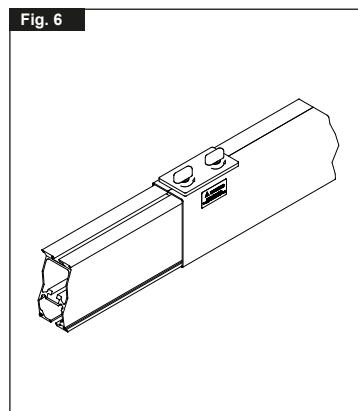

Lås skinnen fast til topbeslagmodulet med de 2 gule fingerskruer.

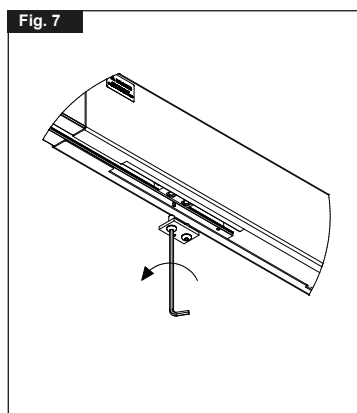


Inden GH1-løftemodulet indsættes, løsnes de 2 gule fingerskruer, og endestoppet fjernes.

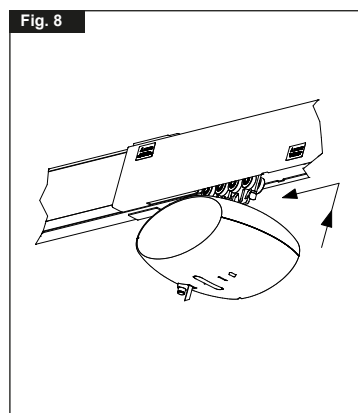


Indsæt GH1-løftemodulet i det fritstående skinnesystem.

Fig. 9

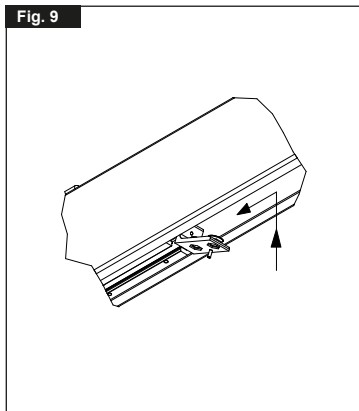


Monter endestoppet igen, og sørg for, at rørsplitten er placeret i det forborede hul.

Fig. 10

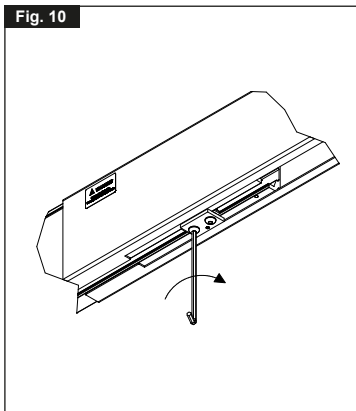


Spænd endestoppet.

Fig. 11

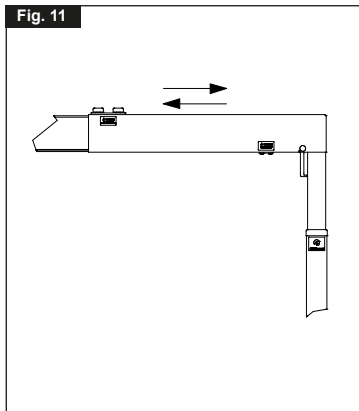


Sådan justeres det fritstående skinsystem til den specifikke rumstørrelse: Løsn de 2 gule fingerskruer, og skub/træk topbeslagene på skinnen.

Fig. 12

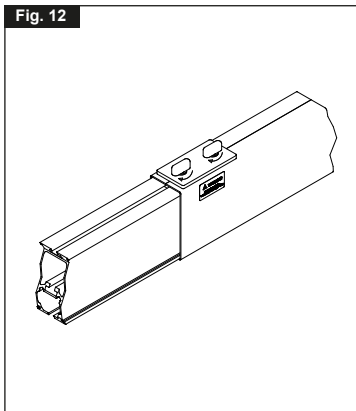


Spænd derefter de 2 gule fingerskruer på hvert topbeslag.

Fig. 13

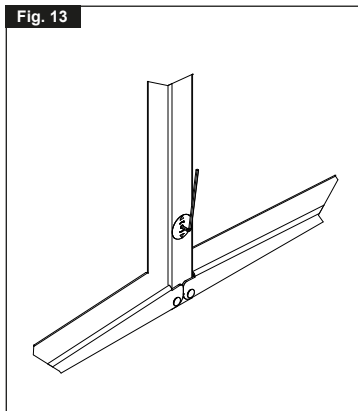


Justér højden ved at indsætte den medfølgende 5 mm 6-kant nøgle i højdejusteringsmuffen på siden af de lodrette stolper. Sørg for, at topbeslaget og skinnemodulet er i vater.

Fig. 14

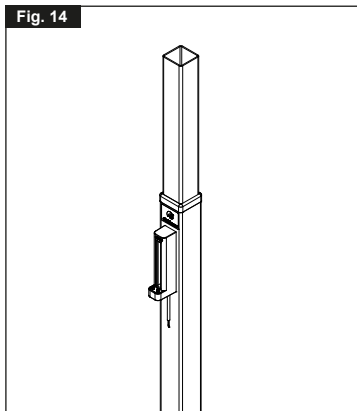

Fastgør opladeren til den lodrette stolpe lige under Guldmann-logoet med det medfølgende velcro.

Fig. 15

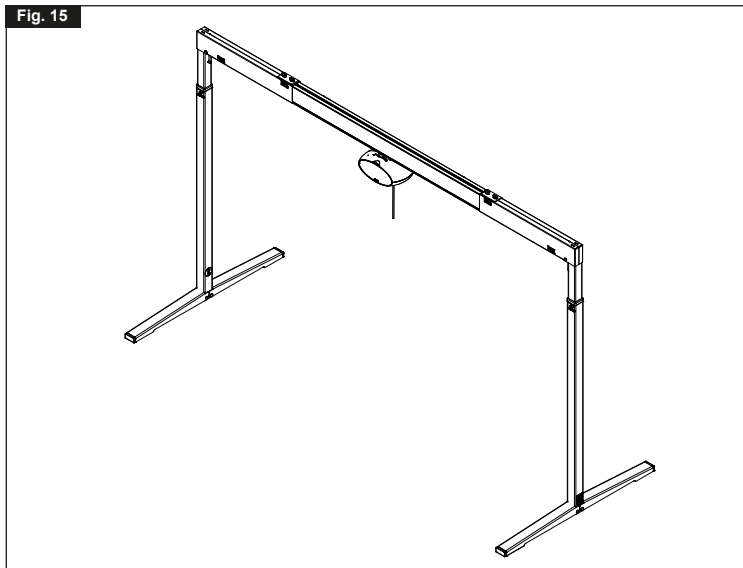

Det fritstående skinnesystem er nu klar til brug.

2.01

Betjening


Det fritstående justerbare skinnesystem er et transportabelt system, som efter opstilling ikke kræver yderligere handling.

2.02


Længde- og højdejustering**Længdejustering:**

(når systemet er i den laveste position):

- Opstilling af systemet (se 1.06).
- Løsn de 2 gule fingerskruer oven på beslagene manuelt.
- Træk skinnen ud af topbeslagene eller skub skinnen ind, indtil den har den ønskede længde.
- Spænd de 2 gule fingerskruer oven på beslagene manuelt, når du er færdig med justeringen.

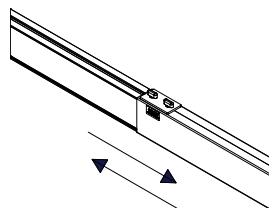**Højdejustering:**

- Opstilling af systemet (se 1.06).
 - Sæt den medfølgende 5 mm 6-kant nøgle eller en el-boremaskine med et 5 mm 6-kant bits i højdejusteringshullet på siden af den lodrette stolpe.
- Justér hver stolpe til den ønskede højde, og justér derefter systemet, indtil topbeslaget og skinnemodulet er i vater.

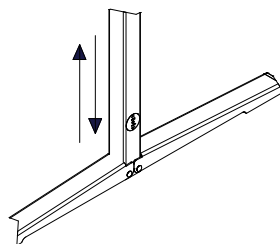**NB!**

Ved brug af el-boremaskine, skal man starte i lavt gear, og der må ikke køres helt i top eller helt i bund.

3.00

Demontering og transport

3.01

Demontering af systemet

Sænk systemet til laveste position.

Demonter det fritstående skinnesystem i omvendt rækkefølge af monteringen (se 1.06).

Det kan være nødvendigt at skubbe topbeslaget opad for at frigøre det fra det lodrette stolpemodul.

Vigtigt:

Inden det fritstående skinnesystem tages ned, skal løftemodulet tages ud eller sikres ved hjælp af endestoppene.

3.02 Transport af systemet

Det fritstående skinnesystem skal, som minimum, skilles ad, så de lodrette stolpemoduler adskilles fra topbeslagene og skinnen (se 3.01).

Under transport anbefaler Guldmann, at systemet efter demontering altid transporteres i Guldmanns transporttaske, varenr. 553225.

4.00 Vedligeholdelse og opbevaring

4.01 Rengøring

Rengør det fritstående system med en fugtig klud påført almindelige rengøringsmidler. Der må ikke anvendes kemikalier eller autoklaving til rengøring af det fritstående skinnesystem.

4.02 Opbevaring

Det fritstående skinnesystem skal opbevares i et rum, hvor luftfugtigheden ikke overstiger 70 %. Det fritstående skinnesystem må ikke opbevares på badeværelser eller lignende.

4.03 Vedligeholdelse

Kontrollér jævnligt, at systemet er stabilt.

5.00 Service og levetid

5.01 Levetid

Det fritstående justerbare skinnesystem har en forventet levetid på 15 år, på betingelse af korrekt anvendelse og korrekte serviceeftersyn (se 5.02).

Reservedelstegninger kan rekvireres hos producenten eller leverandøren.

5.02**Sikkerheds-/serviceeftersyn**

I henhold til den internationale standard EN/ISO 10535 "Hoist for the transfer of disabled persons – Requirements and test methods" **skal** der udføres et sikkerhedseftersyn på løftemodulet og skinnesystemet mindst 1 gang årligt. Guldmann anbefaler, at regelmæssige sikkerheds-/serviceeftersyn udføres én gang årligt.

Sikkerheds/service eftersyn af produkterne skal udføres af Guldmann Service Team eller en certificeret servicetekniker. I forbindelse med købet, kan Guldmann tilbyde en serviceaftale, der omfatter disse eftersyn.

Under sikkerheds-/serviceeftersynet skal der føres rapport over, hvad der kontrolleres og udskiftes. Dele, som er slidte eller defekte, skal udskiftes med originale reservedele fra Guldmann. Reservedelstegninger og dokumentation kan rekvireres hos Guldmann Service Team.

Dokumentation/tjekliste i forbindelse med sikkerheds-/serviceeftersyn kan rekvireres hos Guldmann Service Team.

5.03**Fejlfinding****1. Systemet står ikke stabilt**

- Kontrollér, at fødderne er monteret korrekt
- Kontrollér, at de lodrette stolper er skubbet sikkert ind i topbeslaget
- Kontrollér, at topbeslagene er spændt
- Kontrollér, at topbeslagene er placeret korrekt
- Kontrollér topbeslagene for defekter eller skævheder
- Kontrollér, at de gule fingerskruer er spændt

2. Den lodrette højdejustering virker ikke

Kontrollér forsigtigt med en 5 mm 6-kant nøgle, at systemet ikke er blokeret i endepositionen.

Hvis den øverste del af den lodrette stolpe ikke bevæger sig op eller ned, når du drejer den 5 mm 6-kant nøgle, skal du stoppe brugen af systemet og kontakte forhandleren eller producenten.



CE mærke




Medicinsk udstyr klasse I i overensstemmelse med EU MDR Regulativ




Læs brugsanvisningen inden ibrugtagning

Eksempler på labels

Topbeslag

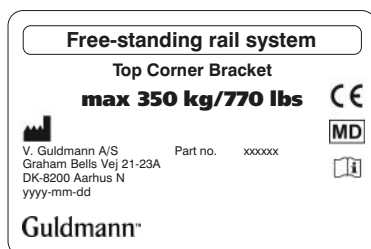

Lodret stolpe

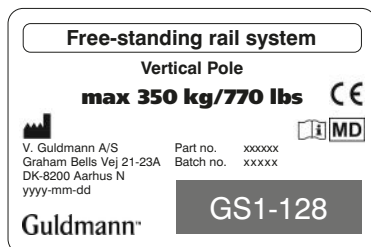

Fritstående skinneresystem, 2,0 m

Dimensioner min. (HxB).	2020 x 2220 mm
Dimensioner i udstrakt position maks. (HxB).	2820 x 3390 mm
Maksimal løftekapacitet	255 kg
Totalvægt uden løftemodul:	
Fritstående skinneresystem	49,5 kg
Lodret stolpe, hver	13,5 kg
Topbeslag og skinne	22,5 kg

Fritstående skinneresystem, 2,5 m

Dimensioner min. (HxB).	2020 x 2720 mm
Dimensioner i udstrakt position maks. (HxB).	2820 x 3890 mm
Maksimal løftekapacitet	255 kg
Totalvægt uden løftemodul:	
Fritstående skinneresystem	52,0 kg
Lodret stolpe, hver	13,5 kg
Topbeslag og skinne	25,0 kg

Fritstående skinneresystem, 3,0 m

Dimensioner min. (HxB).	2020 x 3220 mm
Dimensioner i udstrakt position maks. (HxB).	2820 x 4390 mm
Maksimal løftekapacitet	255 kg
Totalvægt uden løftemodul:	
Fritstående skinneresystem	54,5 kg
Lodret stolpe, hver	13,5 kg
Topbeslag og skinne	27,5 kg

Materialer

Skinner og stolper:	Anodiseret aluminium
Fødder:	Pulverlakeret stål
Beslag:	Pulverlakeret stål

Produktet er fremstillet i henhold til Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/745 af 5. april 2017, som medicinsk udstyr klasse I.

Guldmann arbejder løbende på at sikre, at virksomhedens påvirkning af miljøet både lokalt og globalt reduceres til et minimum.

Det er Guldmanns målsætning at:

- Efterleve den gældende lovgivning på miljøområdet (f.eks. WEEE- og REACH-direktiverne)
- Sikre, at vi i videst mulige udstrækning benytter materialer og komponenter, der overholder RoHS-bekendtgørelsen
- Sikre, at vores produkter ikke unødigt påvirker miljøet negativt i forbindelse med brug, genbrug og evt. destruktion
- Sikre, at vores produkter medvirker til et positivt arbejdsmiljø de steder, hvor de anvendes

Der gennemføres årligt tilsyn af forvaltningen Natur og Miljø under Aarhus Kommune med udgangspunkt i miljøbeskyttelseslovens § 42.

Garanti

Guldmann garanterer, at udstyret er fri for materielle defekter under normal brug og vil fungere i overensstemmelse med de specifikationer, der er angivet i den med udstyret følgende dokumentation.

Denne udtrykkelige garanti gælder i et år fra datoen for det oprindelige køb og første installation ("Garantiperioden"). Hvis et gyldigt klagekrav indsendes i Garantiperioden i forbindelse med funktionsfejl eller udstyrsfejl, vil Guldmann reparere eller udskifte udstyret uden ekstra omkostninger for dig. Det er alene Guldmanns afgørelse, om udstyret skal repareres eller udskiftes.

Garantien dækker ingen dele af udstyret, der har været udsat for skadevoldelse eller misbrug af brugeren eller andre. Garantien dækker ingen dele af udstyret, der er blevet modificeret eller ændret på nogen måde af brugeren eller andre. Guldmann garanterer ikke, at løfteanordningens funktioner opfylder dine krav eller fungerer uafbrudt eller fejlfrit.

Denne garanti er gældende med mindre andet er aftalt, og de ovenfor anførte afhjælpninger er de eneste afhjælpninger, der tilbydes. Ændringer af denne garanti eller supplerende garantier er kun bindende for Guldmann, hvis de afgives af en af Guldmanns dertil bemyndigede funktionærer. Følgelig udgør yderligere udsagn som reklamer eller præsentationer, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, ikke garantier udstedt af Guldmann.

Denne garanti er ugyldig, hvis udstyret betjenes og vedligeholdes på en måde, som ikke er i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse eller instruktionerne, der følger med produktet. For at garantien skal forblive gældende i hele Garantiperioden, skal al service på udstyret udføres af en Guldmann certificeret tekniker. Eventuelle dele eller komponenter repareret eller udskiftet af en Guldmann certificeret tekniker vil være under garanti i resten af Garantiperioden.

B. Service eller reparation

Kontakt Guldmanns reparationsafdeling for at indhente en godkendelse, før defekte dele returneres inden for Garantiperioden. Du vil modtage et returgodkendelsesnummer samt en adresse for returnering af varen til garantiservice eller udskiftning. Returner ikke dele til Guldmann under garantien uden først at have modtaget et returgodkendelsesnummer.

Sendes delen eller delene med posten, skal disse pakkes omhyggeligt ind for at forhindre skader. Medsend dit returgodkendelsesnummer, en kort beskrivelse af problemet samt din returadresse og dit telefonnummer. Guldmann påtager sig intet ansvar for tab eller skader under transporten, så det anbefales at forsikre pakken.

| Time to care |

V. Guldmann A/S
Tlf. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.dk