

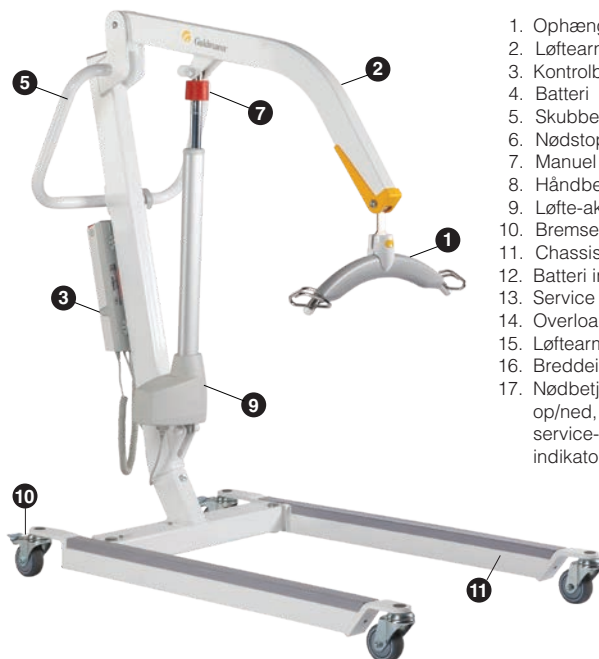


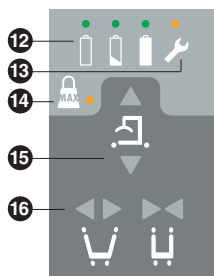

Quick Guide - GL5.2 mobil personløfter

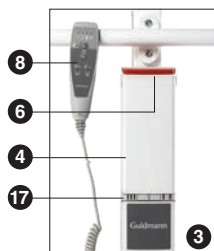

1. Ophængsbøjle
2. Løftearm
3. Kontrolboks
4. Batteri
5. Skubbehåndtag
6. Nødstop
7. Manuel nødfir (option)
8. Håndbetjening
9. Løfte-aktuator
10. Bremse/udløser
11. Chassisben
12. Batteri indikator
13. Service indikator
14. Overload indikator
15. Løftearm - op/ned
16. Breddeindstilling
17. Nødbetjening:
op/ned, batteri-,
service- og overload
indikator

Tjekliste før brug

- Kontroller at personløfteren kører frit.
- Tjek at bremsefunktionen (10) på hjulene virker.
- Kontroller at løftearmen (2) kan hæves og sænkes ved hjælp af håndbetjeningen (8).
- Tjek at breddeindstillingen (16) kan justeres (åbnes/lukkes) ved hjælp af håndbetjeningen (8).
- Tjek at nødbetjeningsfunktionerne op/ned (17) på kontrolboksen (3) virker. Kontroller det manuelle nødfir (7) ved at dreje det i pilens retning.
- Du tænder for personløfteren igen ved at aktivere de 2 knapper på siden af batteriet og efterfølgende klikke det på plads igen - se billeder på næste side.

- Vær opmærksom på at løftebøjlen kan svinge frit (1) og tjek at løftebøjlen er forsvarligt fastgjort til løftearmen (2).

Opladningsmuligheder

- Integreret oplader i kontrolboks - forbind kabel til stikkontakt.
- Når kablet er forbundet til en tændt stikkontakt, vil den grønne diode på kontrolboksen (3) lyse.
- Den grønne diode på kontrolboksen (3) vil lyse når batteriet oplades. Når batteriet er fuldt opladet lyser 3 grønne dioder.



Aktiverer de 2 grå knapper.



Træk ud.



Sæt på plads igen.

Indikatorlamper og lydsignaler

Status	Indikatorlamper	Lydsignaler	Mulige GL5.2 signaler			
			Op	Ned	Benjustering	Nødfiring
Håndbetjening						
Batteri opladet 75-100 %	3 grønne lys		x	x	x	x
Batteri opladet 50-75 %	2 grønne lys		x	x	x	x
Batteri opladet 50 %	1 grønt lys		x	x	x	x
Kritisk lavt batteri to cyklusser tilbage	1 gult lys	Bipper ved aktivering af knap	x	x	x	x
Service på personløfter	Gul. Lyser under brug samt i 2 minutter efter		x	x	x	x
Overload	Gul. Blinker 3 gange + lyser i 10 sekunder			x		x
Styreboks						
Lader	Grøn - blinker					
Opladt	Grøn					

Daglig rengøring og vedligeholdelse

Rengøring skal foregå med en fugtig klud og almindelige rengøringsmidler. Der må ikke anvendes stærke syrer, baser eller alkohol til rengøring. Se evt. brugermanual.





Scan her for brugermanual m.m.
vedrørende brug af GL5.2.

Tilbehør

Løftebøjlen

Sejlstropperne placeres i krogene. Ved løft tjek at løftestroppen forbliver i den korrekte position i løftebøjleens krog.

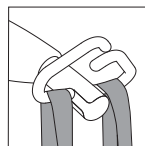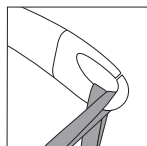

| Time to care |

Kontakt Guldmann på:

Salg: +45 8741 3100
salgdk@guldmann.com
Service: +45 8741 3191
service@guldmann.com