

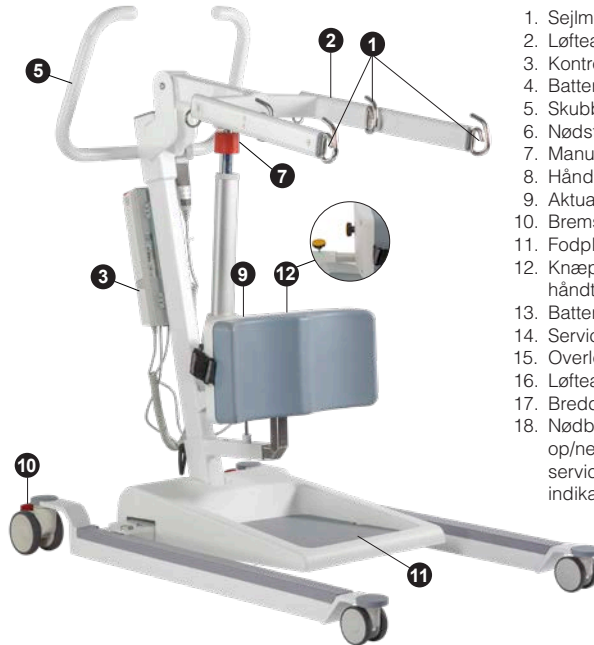


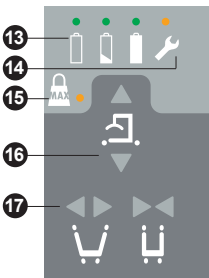

Quick Guide - GLS5.2 Aktiv personløfter

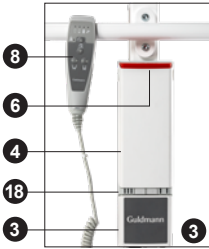

1. Sejlmonteringskroge
2. Løftearm
3. Kontrolboks
4. Batteri
5. Skubbehåndtag
6. Nødstop
7. Manuel nødфир
8. Håndbetjening
9. Aktuator
10. Bremse/udløser
11. Fodplade
12. Knæpude & justeringshåndtag x 2
13. Batteri indikator
14. Service indikator
15. Overload indikator
16. Løftearm - op/ned
17. Breddeindstilling
18. Nødbetjening: op/ned, batteri-, service- og overload indikator


Tjekliste før brug

- Kontroller at personløfteren kører frit.
- Tjek at bremsefunktionen (10) på hjulene virker.
- Kontroller at løftearmen (2) kan hæves og sænkes ved hjælp af håndbetjeningen (8).
- Tjek at breddeindstillingen (17) kan justeres (åbnes/lukkes) ved hjælp af håndbetjeningen (8).
- Tjek at nødbetjeningsfunktionerne op/ned (18) på kontrolboksen (3) virker. Kontroller det manuelle nødфир (7) ved at dreje det i pilens retning .
- Du tænder for personløfteren igen ved at aktivere de 2 knapper på siden af batteriet og efterfølgende klikke det på plads igen - se billeder på næste side.

- Løsn knæpudens gule justeringshåndtag x 2 (12). Puden kan nu justeres op/ned og in eller ud. Stram de gule håndtag igen for at låse knæpuden i den nye position.
- Sørg for, at fodpladen (11) er sikker og ren.

Opladningsmuligheder

- Integreret oplader i kontrolboks - forbind kabel til stikkontakt.
- Når kablet er forbundet til en tændt stikkontakt, vil den grønne diode på kontrolboksen (3) lyse.
- Den grønne diode på kontrolboksen (3) vil lyse når batteriet oplades. Når batteriet er fuldt opladet lyser 3 grønne dioder.

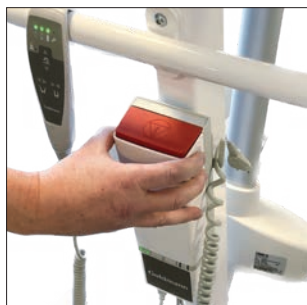

Aktiverer de 2 grå knapper.



Træk ud.



Sæt på plads igen.

Indikatorlamper og lydsignaler

| Status | Indikatorlamper | Lydsignaler | Mulige GLS5.2 signaler | | | |
|--|--|-------------------------------|------------------------|-----|--------------|-----------|
| | | | Op | Ned | Benjustering | Nødfiring |
| Håndbetjening | | | | | | |
| Batteri opladet 75-100 % | 3 grønne lys | | x | x | x | x |
| Batteri opladet 50-75 % | 2 grønne lys | | x | x | x | x |
| Batteri opladet 50 % | 1 grønt lys | | x | x | x | x |
| Kritisk lavt batteri to cyklusser tilbage | 1 gult lys | Bipper ved aktivering af knap | x | x | x | x |
| Service på personløfter | Gul. Lyser under brug samt i 2 minutter efter | | x | x | x | x |
| Overload | Gul. Blinker 3 gange + lyser i 10 sekunder | | | x | | x |
| Styreboks | | | | | | |
| Lader | Grøn - blinker | | | | | |
| Opladt | Grøn | | | | | |

Daglig rengøring og vedligeholdelse

Rengøring skal foregå med en fugtig klud og almindelige rengøringsmidler. Der må ikke anvendes stærke syrer, baser eller alkohol til rengøring. Se evt. brugermanual.




Scan her for brugermanual m.m.
vedrørende brug af GLS5.2.

Tilbehør

Løftebøjlen

Sejlstropperne placeres i krogene. Ved løft tæk at løftestropen forbliver i den korrekte position i løftebøjleens krog.

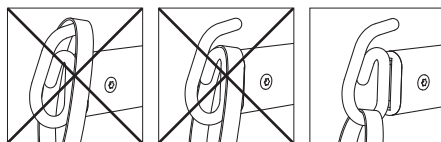

| Time to care |

Kontakt Guldmann på:

Salg: +45 8741 3100
salgdk@guldmann.com
Service: +45 8741 3191
service@guldmann.com