

Voor een veilige behandeling van patiënten

Zorg goed voor uw draagbanden en inspecteer ze regelmatig

Guldmann™

De inspecties van draagbanden worden uitgevoerd om de patiënten en het zorgpersoneel te beschermen, alsmede om de algemene veiligheid te waarborgen in omgevingen, zoals in verzorgingshuizen en instellingen, waar mensen worden opgetild en verplaatst met behulp van een tilband.

Volgens EN/DS ISO 10535:2021 moeten regelmatige inspecties van tilbanden worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant, met een minimum van elke 6 maanden.

Systematische inspectie van de tilbanden heeft vele voordelen

Tijdens de systematische inspectie van uw tilband, kunt u regelmatig slijtage en defecten opsporen, zodat het dagelijks gebruik altijd veilig en comfortabel blijft voor zowel de patiënt als het verplegend personeel. Inspecties bieden ook de gelegenheid om te controleren of het juiste type draagband beschikbaar is, en om te controleren of er niet meer draagbanden van dezelfde maat en hetzelfde type zijn dan nodig is.

Draagbandinspecties moeten grondig en systematisch plaatsvinden, en het is aan te bevelen dat zowel visuele als handmatige inspecties worden uitgevoerd. Dit is omdat sommige vormen van schade veel gemakkelijker zijn op te sporen als het materiaal fysiek wordt aangeraakt. Bijvoorbeeld: Stijfheid van

het materiaal, defecte lussen en versleten stof. Met een visuele inspectie worden waarschijnlijk niet alle vormen van beschadiging van de draagband gedetecteerd.

Zodra de draagband tekenen van schade begint te vertonen, kan zijn gewichtsbegrenzing niet zomaar worden verlaagd met de bedoeling om de levensduur van de draagband te verlengen. De gebruiksregel dient te zijn: als de draagband intact is, dan kan hij worden gebruikt. Als de draagband is beschadigd, dan kan hij **niet** worden gebruikt.

Wees voorzichtig met beschadigde en defecte draagbanden en stel deze buiten gebruik als er sprake is van een van de volgende situaties:

- Op de draagband en/of stof zelf
1. Chemische en roestplekken
 2. Gesmolten voorwerpen of brandvlekken
 3. Krassen, gaten, scheuren of inkepingen
 4. Kapotte of versleten stiksels
 5. Ontbrekende, onleesbare of onbruikbare etiketten op de draagband
 6. Knopen in de draagband
 7. Slijtage
 8. Andere zichtbare schade die de sterkte van de draagband twijfelachtig maakt.

Documentatie van draagbandnaleving

In overeenstemming met ISO 10535:2021 moet elke draagband zijn eigen logboek hebben (op papier of in elektronische vorm), dat wordt geïdentificeerd met het serienummer van de desbetreffende draagband. Alle inspecties moeten in het logboek worden geregistreerd. De eigenaar van de draagband is verantwoordelijk voor de inspectie en het onderhoud van het logboek, met inbegrip van het tijdstip voor de volgende inspectie, alsmede de vermelding van de naam van het bedrijf of de organisatie die de inspectie heeft uitgevoerd.

Indien defecten, slijtage of andere schade die de veiligheid van de draagband verminderen, worden ontdekt tijdens de periodieke keuring, dan moet de eigenaar van de draagband daarvan onmiddellijk in kennis worden gesteld.

Opmerking: Inspecties moeten worden uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerd persoon die vertrouwd is met het ontwerp, gebruik en onderhoud van de draagband.



Inspectielijst

1. Is het label van de draagband aanwezig, leesbaar en volledig?

- ☐ Inspecteer op ontbrekende, onleesbare of onvolledige draagbandlabel(s). Dit kan de identificatie van de juiste maat, de functie en de maximale draagkracht van de draagband in gevaar brengen

2. Zijn de banden en de stiksels intact?

- ☐ Inspecteer op kapotte of versleten stiksels
☐ Inspecteer op knopen in lussen
☐ Inspecteer op scheuren of rafels in lussen
☐ Inspecteer op gaten of gaatjes
☐ Inspecteer op deeltjes in het materiaal of de lussen

3. Is het textiel intact?

- ☐ Inspecteer op abnormale slijtagepatronen, extreme slijtage of tekenen van schuren
☐ Inspecteer op sneden of gerafeld materiaal
☐ Inspecteer op ongebruikelijke of aanzienlijke verkleuring
☐ Inspecteer op gaten, gaatjes, scheuren, openingen
☐ Inspecteer op gerafelde of onveilige stiksels
☐ Inspecteer op brandplekken veroorzaakt door zuur, bijtende stoffen of hitte
☐ Inspecteer op veranderingen in de consistentie van het materiaal, zoals toegenomen stijfheid
☐ Inspecteer op deeltjes die in het materiaal zitten
☐ Inspecteer op andere zichtbare schade die de sterkte van de draagband twijfelachtig maakt

Opmerkingen:

Type draagband:

Serienummer:

Inspectiedatum:

Volgende inspectie:

Inspectie uitgevoerd door:

| Time to care |