

Lyftmodulers och skentypers inverkan på lyfthöjden

Denna tabell visar vilka konsekvenser valet av lyftmoduler och skentyper har för lyfthöjden i två olika lyftsituationer:

1. Förflyttning till och från säng
2. Förflyttning till och från rullstol

De närmare förutsättningarna beskrivs nedan.

	Skenor	Takhöjd 225 cm		Takhöjd 240 cm		Takhöjd 250 cm		Takhöjd > 300 cm	
		Säng (x)	Rullstol (y)	Säng (x)	Rullstol (y)	Säng (x)	Rullstol (y)	Säng (x)	Rullstol (y)
GH3/GH1	A-Rail	- 10	+ 25	+ 5	+ 40	+ 15	+ 50	+ 65	+ 100
	B-Rail	- 16	+ 18	- 1	+ 33	+ 9	+ 43	+ 59	+ 93
	C-Rail	- 21	+ 13	- 6	+ 28	+ 4	+ 38	+ 54	+ 88
GH1 Q	A-Rail	- 11	+ 24	+ 4	+ 39	+ 14	+ 49	+ 64	+ 99
	B-Rail	- 18	+ 17	- 3	+ 32	+ 27	+ 42	+ 77	+ 92
	C-Rail	- 22	+ 12	- 7	+ 27	+ 22	+ 37	+ 72	+ 87
GH1 F	A-Rail	- 26	+ 9	- 11	+ 24	- 1	+ 34	+ 49	+ 84
	B-Rail	- 33	+ 2	- 18	+ 17	- 8	+ 27	+ 42	+ 77
	C-Rail	- 38	- 3	- 23	+ 12	- 13	+ 22	+ 37	+ 72
GHZ	GHZ-Rail	0	+ 33	+ 14	+ 48	+ 24	+ 58	+ 74	+ 108



Alla mått är i cm

Fälten i tabellen är antingen röda eller gröna

- Röda fält anger att lyfthöjden inte är tillräckligt hög. Det innebär att det är nödvändigt att lyfta fötterna/benen manuellt. Värdet i fältet anger hur stort avstånd som saknas.
- Gröna fält anger att lyfthöjden är tillräckligt hög och hur stort avstånd som finns till godo.

Förutsättningar

- Person längd 180 cm
- Sele Basic Basic stl medium
- Säng GB4, avståndet från golvet till madrassens överkant är 48 cm
- Rullstol höjden från golvet till sitsens överkant är 55 cm

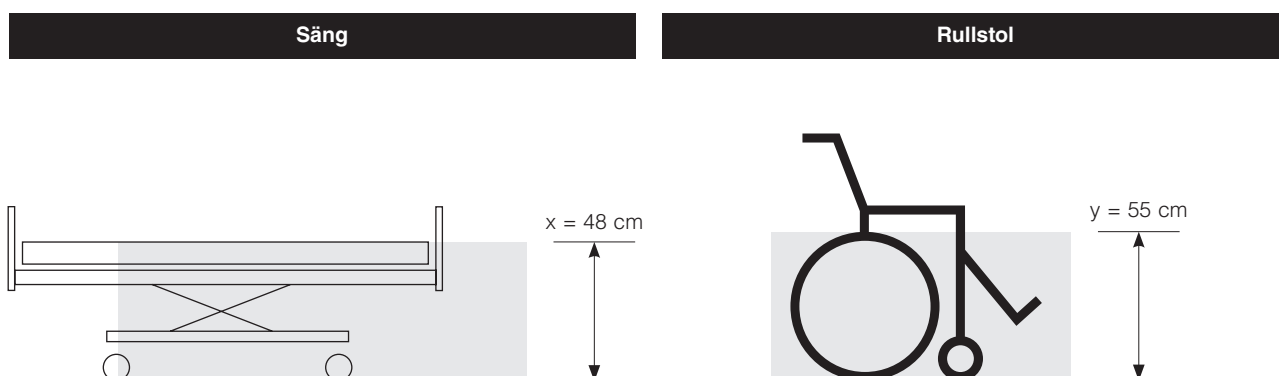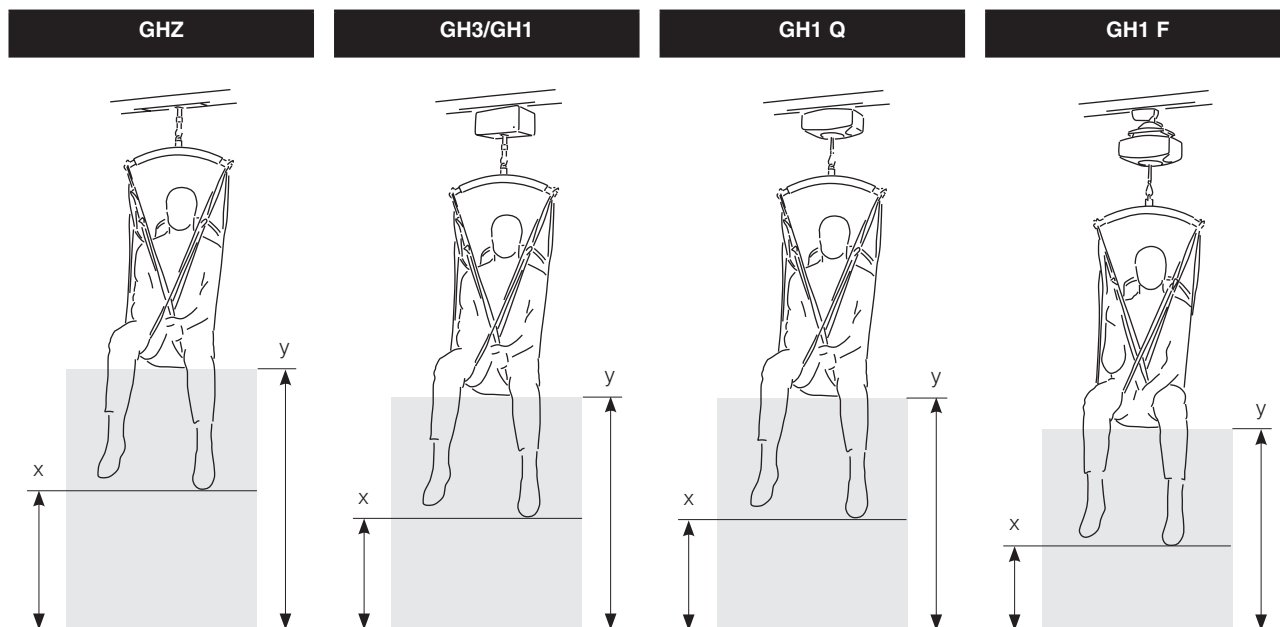

Time to care

V. Guldmann A/S
Huvudkontor:
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Sverige AB
Tel. +46 0322 55290
info@guldmann.se
www.guldmann.se