


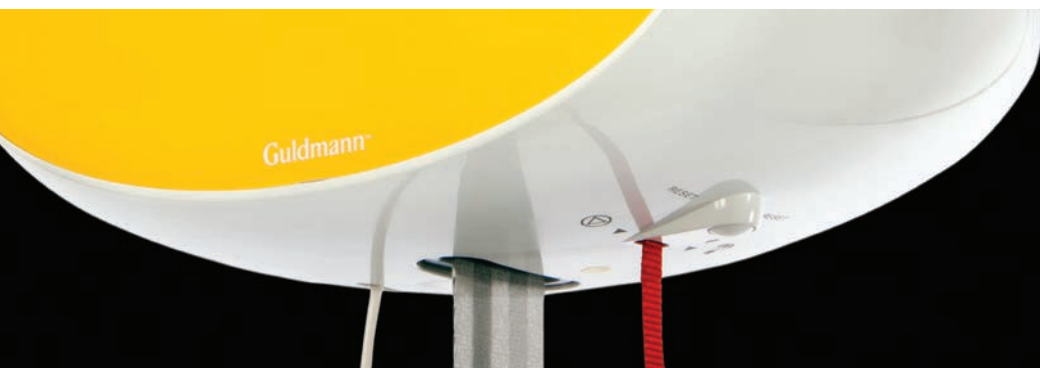


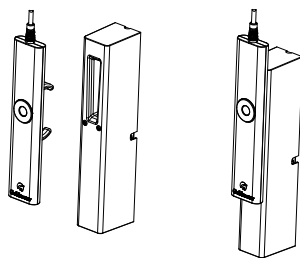

Snabbguide – GH1/GH1 Q

- Lyften aktiveras genom att trycka på en av knapparna på manöverdosan.
- En grön lampa lyser när lyften är klar att användas.
- Om kontrollampen lyser gult betyder det att lyften saknar ström.
- Lyser kontrollampen gult samtidigt som lyften "piper" under aktiveringen ska lyften felanmälas.
- Om lyften inte sätter igång kan det betyda att nödstoppet är aktiverat – det röda bandet (märkt med en triangelsymbol).
- Lyften behöver ej stängas av – den stängs av automatiskt efter avslutad användning (efter ca 2 minuter).
- Lyften laddas när manöverdosan är placerad i dockningsstationen och strömförsörjningen är inkopplad (3 pip vid laddning).
- Max. lyftkapacitet anges på lyften, till exempel 205 kg. Det betyder att lyften får användas av brukare som väger upp till 205 kg. Observera att skensystemet och selen kan ha lägre lyftkapacitet. Det är alltid den lägsta lyftkapaciteten som gäller.
- Om du behöver instruktioner eller utbildning, kontakta din arbetsmiljökoordinator, resursansvarig inom förflyttningar eller din arbetsledare.

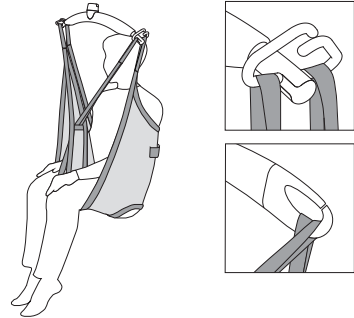

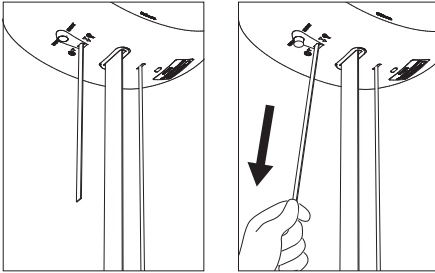

Säkerhetsfunktioner

Nödstopp

- Ett ryck i det röda bandet. Får endast användas i nödfall, när man behöver stoppa lyften omedelbart.
- När nödstoppet är aktiverat är det endast lyftens nödsänkingsfunktion som fungerar.
- Nödstoppet inaktiveras genom att trycka på "stopp" (gul knapp) uppe på lyften. Tryck sedan 2 gånger på en av knapparna på manöverdosan.

Nödsänkingsfunktion

Aktiveras genom att kontinuerligt dra i det röda bandet. Får endast användas i nödfall. Används för att sänka ner brukaren när lyften inte fungerar som den ska.



**Skanna här för bruksanvisning
m.m. om användning av
GH1/GH1 Q.**

Tillbehör

Lyftbygeln

Selens lyftband placeras i krokarna. Kontrollera att lyftbanden är korrekt monterade på bygeln.

Lyftsele

Vi rekommenderar att en lyftsele med slingformad upphängning används för fastsättning på lyftbyglar med 2 eller 4 förankringspunkter och som alltid motsvarar lyftens lyftkapacitet. Använd alltid produkter som var och en är CE-märkt. Kontakta alltid leverantören om det uppstår tveksamheter kring användning av lyftselen.

Daglig rengöring och underhåll

Rengör produkten med en fuktig trasa och vanligt rengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel som innehåller kraftigt syra eller basiska ämnen eller alkohol. Se ev. bruksanvisningen.

| Time to care |

Kontakta Guldmann på:

Kundservice: 0322-55290

info@guldmann.se