

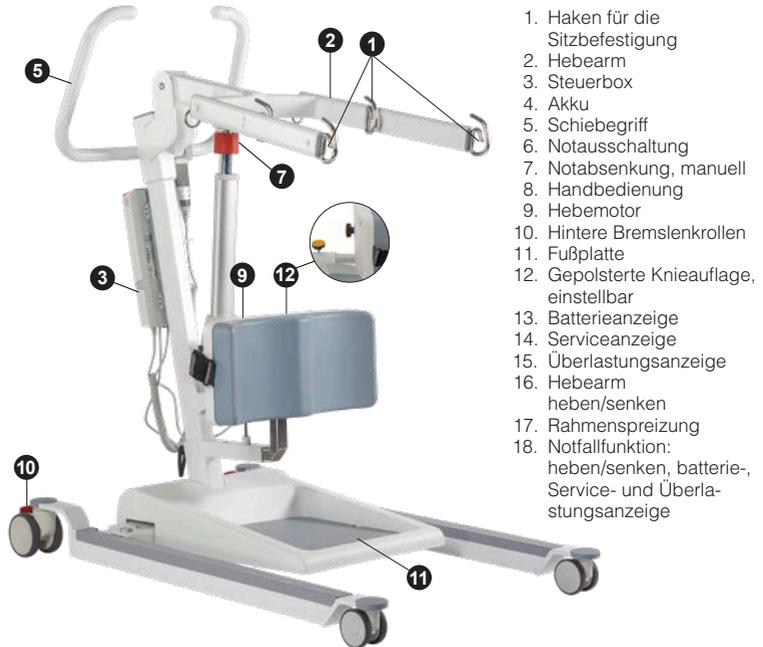


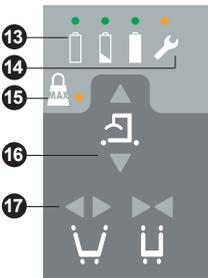

Kurzanleitung - GLS5.2 Aktiver Personenlifter

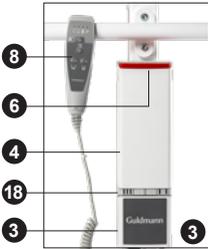

1. Haken für die Sitzbefestigung
2. Hebearm
3. Steuerbox
4. Akku
5. Schiebegriff
6. Notausschaltung
7. Notabsenkung, manuell
8. Handbedienung
9. Hebemotor
10. Hintere Bremslenkrollen
11. Fußplatte
12. Gepolsterte Knieauflage, einstellbar
13. Batterieanzeige
14. Serviceanzeige
15. Überlastungsanzeige
16. Hebearm heben/senken
17. Rahmenspreizung
18. Notfallfunktion: heben/senken, batterie-, Service- und Überlastungsanzeige

Checkliste für Bediener vor der Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass sich der Personenlifter störungsfrei auf seinen Rädern bewegen lässt.
- Stellen Sie die Bremsen (10) fest, um sich von ihrer Funktionstüchtigkeit zu überzeugen.
- Bewegen Sie den Hebearm (2) durch Drücken der Tasten (16) auf der Handbedienung (8) nach oben und unten.
- Prüfen Sie mithilfe der Handbedienung (8), ob sich die Rahmenstützbeine (17) einwandfrei spreizen und wieder zusammenführen lassen.
- Überprüfen Sie die Notfallfunktion „auf/ab“ durch Drücken der Tasten (18) auf dem Schaltkasten (3), und überprüfen Sie auch durch manuelle Betätigung des Drehknopfes (7) in Pfeilrichtung die Funktionstüchtigkeit der Notabsenkung.
- Um den Not-Stopp-Knopf freizugeben, nehmen Sie die Batterien heraus, indem Sie die Knöpfe an

den Seiten der Batterie drücken, und setzen Sie sie wieder ein. Sehen Sie dazu auch die Bilder auf der nächsten Seite an.

- Einstellen des Kniepolsters mit 2 Knöpfen (12). Das Polster kann in vertikaler und horizontaler Richtung eingestellt werden. Drehen Sie die Knöpfe fest.
- Vergewissern Sie sich, dass die Fußplatte (11) gesichert und sauber ist.

Ladeoptionen

- Ladegerät integriert in Steuerbox - stecken Sie das Stromkabel in eine Steckdose.
- Wenn der Netzstecker mit dem Strom verbunden ist, leuchtet die grüne LED auf der Steuerbox.
- Die grüne LED-Lampe am Schaltkasten (3) blinkt während des Ladevorgangs. Sobald die Batterien voll aufgeladen sind, leuchten drei grüne LED-Lampen gleichzeitig.



Gleichzeitig die grauen Knöpfe an den Seiten drücken.



Wieder in die Halterung hineindrücken.



Gerade herausziehen.

Kontrollleuchten und Audiosignale

Status	Anzeigelampen	Audiosignale	Mögliche Signale des GLS5.2			
			Anheben	Absenken	Beinspreizung	Notabsenkung
Handbedienung						
Akkuladung 75 - 100 %	3 grüne Leuchten		x	x	x	x
Akkuladung 50 - 75 %	2 grüne Leuchten		x	x	x	x
Akkuladung <50 %	1 grüne Leuchte		x	x	x	x
Akku sehr schwach, zwei Zyklen verbleiben	1 gelbes Leuchte	Signalton bei Tastenbetätigung	x	x	x	x
Wartung des Personenlifters	Gelb. Leuchtet während der Verwendung und 2 Minuten danach		x	x	x	x
Überlast	Gelb. Blinkt dreimal und leuchtet 10 Sekunden lang			x		x
Steuerungskasten						
Ladegerät	Grün - blinkt					
Geladen	Grün					

Tägliche Reinigung und Wartung

Reinigen Sie den Deckenlifter mit einem feuchten Tuch und handelsüblichem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine starken Säuren, Basen oder Alkohol zur Reinigung. Siehe Benutzerhandbuch.




Scannen Sie den QR-Code für die Bedienungsanleitung usw. zur Verwendung des GLS5.2.

Zubehör

Aufhängebügel

Bringen Sie den Hebegurt für den Sitz an den Haken an. Stellen Sie während des Hebens sicher, dass der Hebegurt in Position bleibt.

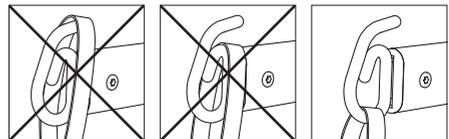

Time to care

Kontaktieren Sie Guldmann über:

Telefon: +49 (0) 611 974 530

E-Mail: info@guldmann.de