





Guide rapide – GH1/GH1 Q

- Le module de levage sur rail est mis en route en appuyant sur l'un des boutons de la commande manuelle.
- Un indicateur lumineux de couleur verte indique que le module est sous tension et prêt à l'emploi.
- Un indicateur lumineux de couleur jaune indique que le module n'est pas branché au secteur.
- Un indicateur lumineux de couleur jaune et un module émettant des bips lorsqu'il est activé indiquent une panne.
- Si le module de levage sur rail ne s'allume pas, cela est peut-être dû à l'activation du bouton d'arrêt d'urgence – sangle rouge (étiquetée avec un symbole en forme de triangle).
- Le module n'a pas besoin d'être mis hors tension, il s'éteint automatiquement après deux minutes d'inactivité.
- Le module se recharge lorsque la commande manuelle est placée dans la station de charge et que l'alimentation électrique est branchée (3 bips sonores confirment le chargement). La position du cintre de levage n'a pas d'incidence sur le rechargement. Le rechargement se fait toujours indépendamment de la hauteur du cintre de levage.
- La capacité de levage du module est indiquée sur le module, p. ex. 205 kg. Cela signifie que le module peut être utilisé pour des charges inférieures ou égales à 205 kg. Veuillez néanmoins noter que le système de rail ou le harnais peuvent avoir une capacité de levage inférieure. La charge ne doit pas dépasser la capacité de levage la plus basse.
- Si vous avez des questions à propos des instructions et de la formation, veuillez contacter votre coordinateur santé et sécurité, votre responsable des ressources humaines ou votre responsable produit.

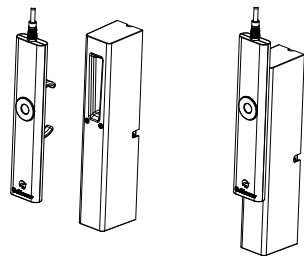

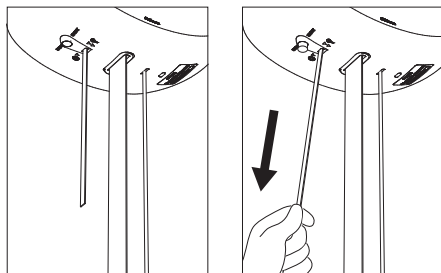

Fonctions de sécurité

Arrêt d'urgence


- Il peut être activé en tirant sur la sangle rouge. Utilisez-le uniquement dans les situations d'urgence où l'arrêt immédiat du module est nécessaire.
- Lorsque l'arrêt d'urgence est activé, seul le dispositif de descente d'urgence du module fonctionne.
- Désactivez l'arrêt d'urgence en appuyant sur le bouton Stop (bouton jaune) du module. Appuyez ensuite deux fois sur l'un des boutons de l'unité de commande manuelle.

Dispositif de descente d'urgence

Il est activé par une traction prolongée de la sangle rouge. Utilisez-le uniquement en cas d'urgence. Cette fonction permet au patient d'être descendu lorsque le module est tombé en panne.



Scannez le code pour accéder au manuel d'utilisation, etc. concernant l'utilisation du GH1/GH1 Q.

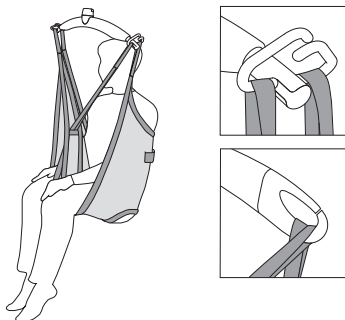

Accessoires

Cintre de levage

Placez les sangles du harnais dans les crochets. Assurez-vous que les sangles sont correctement fixées au cintre.

Harnais de levage

Nous vous recommandons d'utiliser un harnais de levage à 2 ou 4 fixations pour attacher le harnais au cintre de levage. Le harnais doit toujours être adapté à la capacité de levage du module. Utilisez uniquement des produits où est apposé le marquage CE.

En cas de doute concernant l'utilisation d'un harnais de levage, veuillez contacter votre fournisseur.

Nettoyage quotidien et entretien

Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent ordinaire. N'utilisez pas d'acides forts, de bases ou d'alcool lors du nettoyage. Consultez le manuel d'utilisation.

| Time to care |

Pour contacter Guldmann :

Service commercial : +33 145 54 78 36

france@guldmann.com