







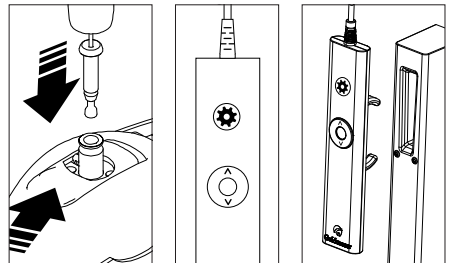
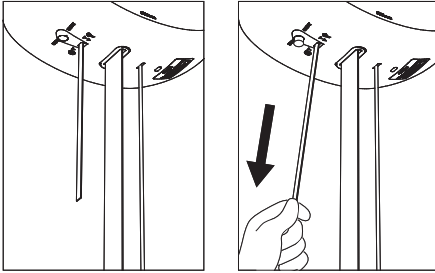




Guide rapide – GH1 F

- Le module de levage sur rail est mis en route en appuyant sur l'un des boutons de la commande manuelle.
- Si le moteur ne s'allume pas, c'est peut-être car l'arrêt d'urgence a été activé.
- Attacher la pièce métallique qui est situé au bout du chariot de transport dans le logement de verrouillage du moteur. Appuyer sur le  bouton en haut de la télécommande. Le bouton s'illumine lorsqu'il est en mode installation. Pour activer l'installation appuyer brièvement sur ce bouton . Attendre le bip en continu qui confirme que l'installation est terminée. Lorsque le GH1F est soit verrouillé soit installé sur le chariot de transport, il faut ré appuyer sur le  bouton afin de sortir du mode installation. Le moteur peut maintenant être utilisé pour transférer un patient avec  et .
- Concernant la désinstallation, appuyer sur le bouton rond  puis appuyer brièvement sur la flèche du bas  pour activer la descente. Attendre le déroulement complet de la corde avant de libérer l'embout métallique. Pour sortir du mode désinstallation ré appuyer sur le bouton rond .
- Le moteur se recharge en insérant la télécommande sur la station de charge. La télécommande doit toujours être insérée dans la station de charge lorsque le moteur n'est pas utilisé. Le chargeur doit être connecté et allumé.
- La capacité de levage maximale du module est indiquée sur le module, p. ex. 255 kg. Veuillez noter que le système de rail ou le harnais peuvent avoir une capacité de levage inférieure. La capacité de levage la plus basse ne doit pas être dépassée.
- Pour plus d'information, consulter le manuel d'utilisation GH1 F.

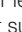



Fonctions de sécurité

Arrêt d'urgence


- Il peut être activé en tirant sur la sangle rouge. Utilisez-le uniquement dans les situations d'urgence où l'arrêt immédiat du module est nécessaire.
- Lorsque l'arrêt d'urgence est activé, seul le dispositif de descente d'urgence du module fonctionne.
- Désactivez l'arrêt d'urgence en appuyant sur le bouton Stop (bouton jaune) du module. Appuyez ensuite deux fois sur l'un des boutons de l'unité de commande manuelle.

Dispositif de descente d'urgence

Il est activé par une traction prolongée de la sangle rouge. Utilisez-le uniquement en cas d'urgence. Cette fonction permet au patient d'être descendu lorsque le module est tombé en panne.



Scannez le code pour accéder au manuel d'utilisation, etc. concernant l'utilisation du GH1 F.

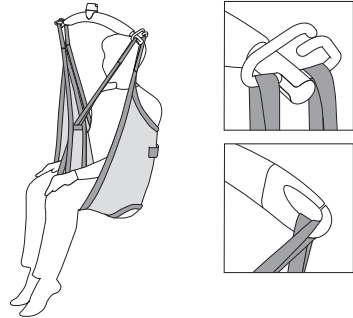

Accessoires

Cintre de levage

Placez les sangles du harnais dans les crochets. Assurez-vous que les sangles sont correctement fixées au cintre.

Harnais de levage

Nous vous recommandons d'utiliser un harnais de levage à 2 ou 4 fixations pour attacher le harnais au cintre de levage. Le harnais doit toujours être adapté à la capacité de levage du module. Utilisez uniquement des produits où est apposé le marquage CE.

En cas de doute concernant l'utilisation d'un harnais de levage, veuillez contacter votre fournisseur.

Nettoyage quotidien et entretien

Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent ordinaire. N'utilisez pas d'acides forts, de bases ou d'alcool lors du nettoyage. Consultez le manuel d'utilisation.

| Time to care |

Pour contacter Guldmann :

Service commercial : +33 145 54 78 36

france@guldmann.com