




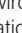
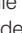

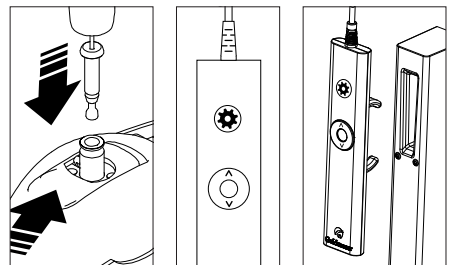
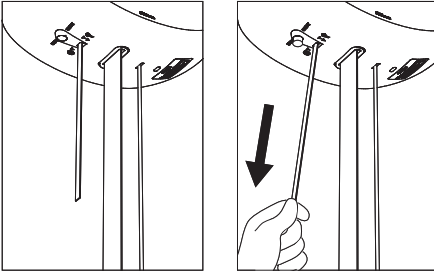




Kurzanleitung – GH1 F

- Der Deckenlifter schaltet sich ein, wenn eine Taste der Handbedienung betätigt wird.
- Schaltet sich das Hebemodul nicht ein, kann es sein, dass die Notausschaltung aktiviert wurde.
- Befestigen Sie den Laufkatzenanker an den Verriegelungsmechanismus oben am Hebemodul. Drücken Sie die  Taste oben auf der Handbedienung. Die Taste leuchtet kurz auf, wenn der Installations-Modus betriebsbereit ist. Um die Installation zu aktivieren, drücken Sie kurz . Warten Sie bis Sie einen langen Piepton hören, dieser bestätigt, dass die Installation abgeschlossen ist. Sobald der GH1 F in der Laufkatze verriegelt ist, drücken Sie  erneut, um den Installations-Modus abzuschließen. Das Hebemodul ist nun zum Heben einsatzbereit, indem Sie  und  drücken.
- Zur Deinstallation des Hebemoduls wählen Sie die Taste  und drücken Sie kurz die Taste  zur Aktivierung. Warten Sie bis die Schnur vollständig herausgezogen ist, bevor der Verriegelungsanker gelöst wird. Drücken Sie  erneut, um die Deinstallation abzuschließen.
- Das Hebemodul kann durch Einsetzen der Handbedienung in die Ladestation am Transport-Trolley aufgeladen werden. Die Handbedienung sollte immer in die Ladestation eingesetzt werden, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Die Stromversorgung muss angeschlossen und eingeschaltet sein.
- Die maximale Tragfähigkeit des Deckenlifters ist auf dem Gerät angegeben, z. B. 255 kg. Beachten Sie bitte, dass das Schienensystem oder der Sitz eine geringere Tragfähigkeit haben können. Die niedrigste Tragfähigkeit darf nicht überschritten werden.
- Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der GH1 F Bedienungsanleitung.





Sicherheitsfunktionen

Notausschaltung

- Ziehen Sie an der roten Schnur. Verwenden Sie diese nur in Notfällen, wenn der Deckenlifter sofort angehalten werden muss.
- Sobald die Notausschaltung aktiviert ist, funktioniert nur noch die mechanische Notabsenkung des Deckenlifters.
- Um die Notausschaltung zu deaktivieren, drücken Sie die Stopp-Taste (gelbe Taste) am Deckenlifter. Drücken Sie anschließend zweimal eine beliebige Taste der Handbedienung.


Notabsenkungsvorrichtung

Die Notabsenkung wird aktiviert durch dauerhaftes Ziehen der roten Schnur. Darf nur im Notfall betätigt werden. Mit dieser Funktion kann der Patient abgesenkt werden, wenn der Deckenlifter ausfällt.



Scannen Sie den QR-Code für die Bedienungsanleitung usw. zur Verwendung des GH1 F.

| Time to care |

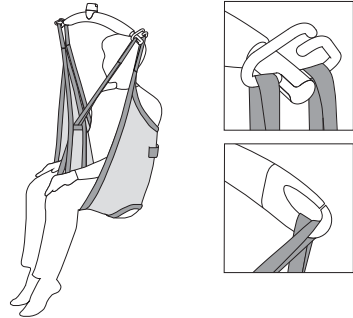

Zubehör

Aufhängebügel

Bringen Sie die Hebegurte für den Sitz an den Haken an. Stellen Sie sicher, dass die Hebegurte richtig am Aufhängebügel befestigt sind.

Hebesitz

Wir empfehlen die Verwendung eines Hebesitzes mit zwei oder vier Schlaufenbefestigungen zum Anbringen des Sitzes am Aufhängebügel. Der Sitz muss immer der Tragfähigkeit des Deckenlifters entsprechen. Verwenden Sie immer Produkte mit CE-Kennzeichnung. Bei Zweifeln bezüglich der Verwendung eines Sitzes wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Tägliche Reinigung und Wartung

Reinigen Sie den Deckenlifter mit einem feuchten Tuch und handelsüblichem Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine starken Säuren, Basen oder Alkohol zur Reinigung. Siehe Benutzerhandbuch.

Kontaktieren Sie Goldmann über:

Telefon: +49 (0) 611 974 530
E-Mail: info@guldmann.de