

# GH1

GH1 Q, GH1 F

Guldmann™

# Sollevatori a soffitto GH1



GH1 Q

– versione aggancio/sgancio

## **Sollevatore a soffitto per lungodegenza**

Il sistema di sollevamento a soffitto GH1 è studiato per soddisfare tutte le esigenze di sollevamento in contesti di assistenza domestica e istituzionale. Occupa uno spazio molto contenuto ed è estremamente facile da utilizzare con la gamma completa di imbragature e altri accessori di sollevamento Guldmann. Il modulo di sollevamento GH1 è disponibile anche nella versione GH1 Q che può essere facilmente agganciata e sganciata dal sistema a binari. GH1 e GH1 Q possono essere installati in quasi tutti i tipi di binari.

## **Prestazioni elevate e massimo comfort**

Il sistema GH1 combina i massimi livelli di sicurezza ed efficienza a un comfort ottimale. Per il personale di assistenza, ciò significa un ambiente di lavoro migliore e meno faticoso, mentre per l'assistito è garanzia di sollevamenti più agevoli e dignitosi.

## **Facilità d'uso**

Come il sistema GH3, anche il GH1 consente al personale di assistenza di sollevare e spostare gli assistiti senza sottoporre la schiena a sforzi eccessivi.

Il sollevatore a soffitto GH1 è in grado di sollevare carichi fino a 205 kg di peso in maniera facile e sicura, con il solo ausilio di un controllo manuale ergonomico e di facile utilizzo. La maggiore velocità di sollevamento consente di dedicare più tempo a importanti mansioni di cura e assistenza.

## **Caricamento veloce**

Il sistema GH1 si ricarica velocemente inserendo il comando manuale nell'apposito caricabatterie. Normalmente il tempo di ricarica è di 2-3 ore e un modulo di sollevamento completamente carico può eseguire più di 55 sollevamenti da 85 kg.

## **Aggancio/sgancio**

Il modulo di sollevamento GH1 Q viene consegnato con un sistema di sbloccaggio veloce che rende molto semplice agganciare e sganciare il modulo dal binario se fossero necessari periodici spostamenti da una stanza ad un'altra o da una residenza ad un'altra. Il modulo di sollevamento può essere spostato senza l'uso di utensili.



# Sollevatori a soffitto GH1



## Design discreto

Il sollevatore a soffitto GH1 e il sistema di binari possono essere abbinati o integrati facilmente in qualsiasi tipo di ambiente. Il sistema GH1 è fornito con una dotazione standard di quattro diverse coperture.

## Più binari – più possibilità

Il sistema di sollevamento a soffitto GH1 è disponibile con 3 diversi tipi di binario, ciascuno progettato per soddisfare esigenze specifiche di spazio e pesi. I binari si integrano facilmente con il design del pavimento e delle pareti e possono essere personalizzati secondo lo stile specifico dell'ambiente grazie a coperture a scatto di colori diversi. Le coperture possono essere sostituite in maniera semplice e veloce per conferire ai binari un aspetto gradevole e rinnovato ogni volta che la stanza viene occupata da un nuovo assistito.

Oltre ai binari da montare al soffitto e alle pareti, il sistema GH1 comprende una struttura a binario mobile. Si tratta di un sistema regolabile sia in altezza sia in larghezza, che rappresenta una soluzione ideale per le esigenze di sollevamento temporanee. L'intero sistema di binari può essere installato da 1 o 2 persone senza necessità di utensili, e può essere approntato e smontato nuovamente in soli 10 minuti.

***I moduli di sollevamento GH1 possono essere installati in quasi tutti i tipi di binari***





# Sollevatori a soffitto GH1

## Sicurezza e affidabilità

Il sollevatore a soffitto GH1 è conforme a tutti gli standard vigenti ed è estremamente sicuro e affidabile.

GH1 presenta numerosi aspetti in comune con il premiato sistema di sollevamento a soffitto GH3, installato in molte strutture ospedaliere tra le più prestigiose del mondo. Il sistema di sollevamento a soffitto GH1 si avvale dell'innovativa e solida tecnologia del sistema GH3, di cui condivide anche design, funzionalità e rapporto qualità-prezzo.


## GH1 – sollevatore a soffitto

Modulo di sollevamento potente, veloce e di facile utilizzo per installazioni permanenti e in sistemi di binari mobili.

- Elevata capacità di sollevamento – fino a 205 kg
- Elevata velocità di sollevamento – 40 mm/sec a pieno carico
- Comando manuale facile e intuitivo
- Materiale altamente riciclabile
- Estremamente facile da pulire
- Sistema di sganciamento rapido
- GH1 Q – con sistema di sbloccaggio rapido (sistema aggancio/sgancio) che facilita, ove necessario, lo spostamento del modulo di sollevamento da una stanza ad un'altra.

**GH1 – il sollevatore a soffitto per tutte le esigenze**

*Sistema a binario singolo auto-sostenuto*

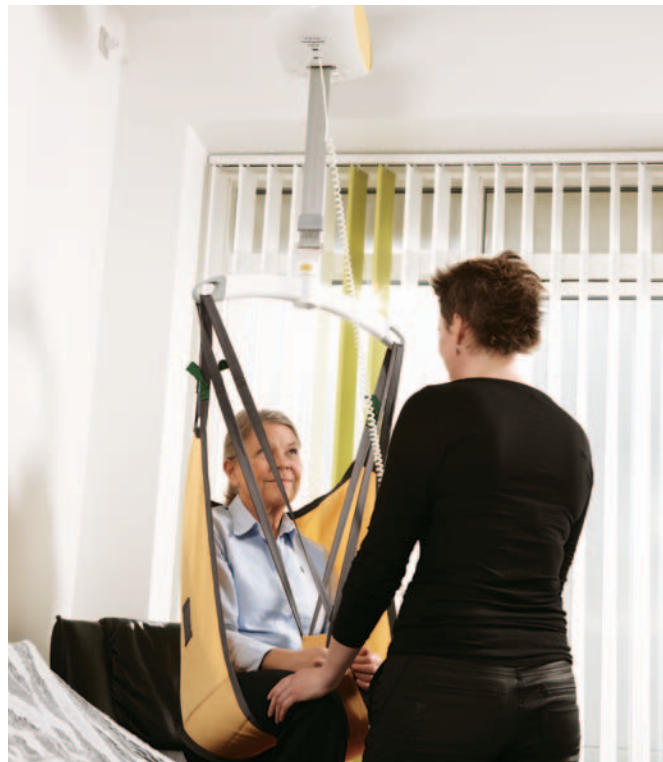

## GH1 F – il sollevatore a soffitto flessibile



GH1 F è un modulo di sollevamento flessibile e facile da spostare da una stanza all'altra per mezzo del carrello di trasporto e custodia in dotazione. Esso si installa e si rimuove automaticamente dal sistema di binari, eliminando in tal modo la necessità di sollevamenti, stiramenti o sforzi eccessivi da parte del personale di assistenza nel processo di spostare e installare il sollevatore.

GH1 F consente di scegliere se installare i binari in tutte le stanze o solo in alcune, e di dotare la struttura di un numero limitato di moduli di sollevamento da spostare con facilità da una stanza all'altra.



Trolley 255 kg  
max 255 kg  
Guldmann

Guldmann

Bestraum  
max 255 kg

## GH1 F – il sollevatore a soffitto flessibile



*Carrello di trasporto e custodia specificamente progettato, con spazio per il modulo di sollevamento, la barra di presa e l'imbracatura.*

### **Flessibilità, efficienza e sicurezza**

Una volta installato, il GH1 F offre esattamente le stesse funzionalità del modulo di sollevamento GH1. Rispetto ai sollevatori portatili tradizionali, offre gli stessi vantaggi di un sollevatore a soffitto fisso:

- L'altezza di sollevamento non dipende dall'altezza degli assistenti
- L'assistito non deve trovarsi in una posizione iniziale bassa e può essere sollevato, per esempio, da una sedia al letto così come dal pavimento
- Elevata capacità di sollevamento – fino a 255 kg
- La testa dell'assistito non viene bloccata dal modulo di sollevamento
- Ampia scelta di barre di presa amovibili per qualsiasi esigenza specifica



### **GH1 F – il sollevatore a soffitto flessibile autoinstallante**

**GH1, GH1 Q e GH1 F fanno parte della linea completa di apparecchiature di sollevamento Goldmann che include binari, sollevatori a soffitto, imbragature e accessori per il sollevamento, tutti perfettamente modulari e intercompatibili. I moduli possono essere combinati variamente e installati praticamente ovunque.**



*Il modulo di sollevamento si installa e si rimuove automaticamente dal sistema di binari, evitando di sottoporre il personale a sollecitazioni eccessive nel processo.*



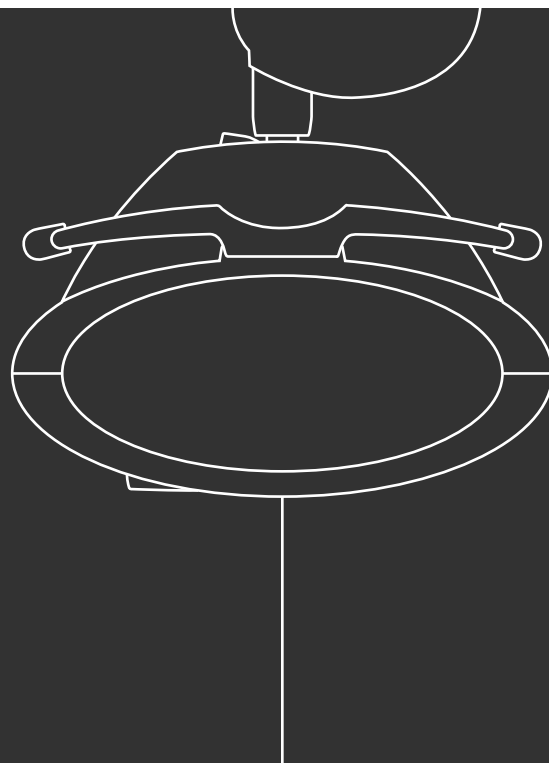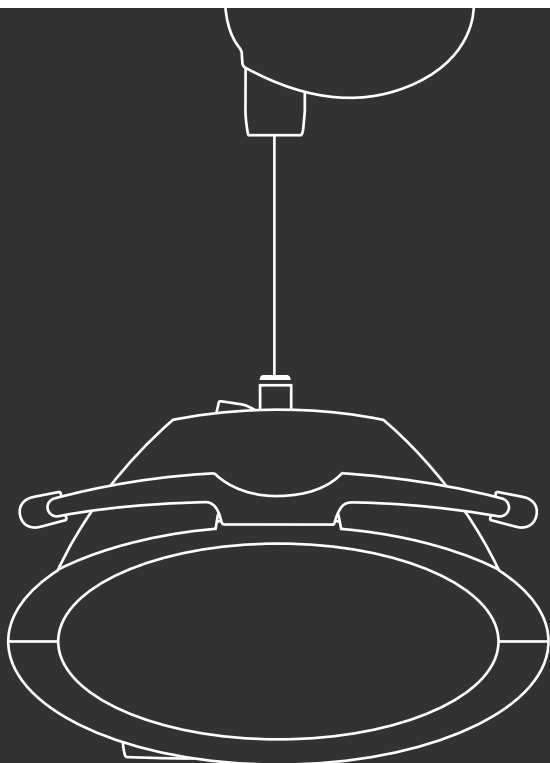

| Time to care |

**V. Guldmann A/S**  
Head Office:  
Graham Bells Vej 21-23A  
DK-8200 Aarhus N  
Tel. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.com

**Guldmann Srl**  
Via Savani, 20/A  
I-43126 Parma  
Tel. +39 0521 660132  
italia@guldmann.com  
www.guldmann.it