

Guida rapida – Trainer Module




Quando l'utente è pronto per iniziare l'esercizio motorio, attivare il sollevatore premendo un pulsante qualsiasi del telecomando, a quel punto comparirà il logo Guldmann. Cliccare sul pulsante **"Menu"**.




Premere → finché sul display non viene visualizzato il menu **"Trainer"**.




Selezionare **"Start"** nel menu Trainer.

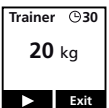

Il Modulo Trainer visualizzerà ora un peso in kg.

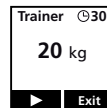


Una volta selezionato il sostegno del peso, l'esercizio motorio inizia premendo il pulsante sinistro del menu "▶".

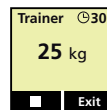

Viene attivato il sostegno automatico del peso e l'esercizio motorio inizia. Questo viene indicato da un display giallo. A questo punto l'utente può eseguire gli esercizi con sostegno del peso come selezionato.

Il peso può essere regolato secondo necessità durante l'esercizio motorio utilizzando le frecce su/giù sul telecomando. Le regolazioni vengono effettuate a intervalli di 1 kg.



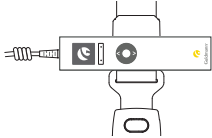

Per il controllo a mani libere, il telecomando può essere agganciato al supporto sulla cinghia. Il controllo a mani libere lascia il terapista con entrambe le mani libere per aiutare l'utente durante l'esercizio motorio e impedisce che la corda si avvolga intorno alla cinghia, rischiando di danneggiarla.

NON posizionare il telecomando sulla barra: la corda si avvolgerà intorno alla cinghia!



Se si desidera interrompere la funzione automatica di esercizio motorio e tornare alla normale modalità "hold to run", attivare uno dei due pulsanti del menu sotto il display "■" o "Exit" (possono essere utilizzati entrambi i pulsanti).





Quando l'esercizio motorio è terminato: selezionare "Exit" per uscire dal Modulo Trainer: a questo punto il sollevatore a soffitto funzionerà normalmente (per sollevamento e trasferimento).





Scansionare qui per ricevere informazioni sul manuale utente, ecc., per quanto concerne l'utilizzo del sistema GH3.


Notifiche degli errori


 Sovraccarico dinamico del sostegno del peso. Sostegno del peso dinamico consentito max. 100 kg. Ridurre il carico per attivare la modalità dinamica.


 Sottocarico dinamico di sostegno del peso. Sostegno del peso dinamico consentito max. 5 kg. Caricare la cinghia per attivare la modalità dinamica.

 È stato raggiunto il limite superiore o inferiore. Assicurarsi che non sia stato attivato il limite superiore e che la cinghia sia stata completamente srotolata.

 Livello della batteria basso. Indica che ci sono meno di 60 secondi di tempo di esercizio motorio disponibili.

 Livello della batteria critico. Il modulo di esercizio motorio si spegnerà.

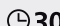 **30** Indicatore del tempo. Indica il tempo di esercizio motorio rimanente in minuti.

 Il tempo di esercizio motorio è inferiore a 1 minuto o è stato superato.

| Time to care |

Per contattare Guldmann rivolgersi a:

Ufficio vendite: +39 0521 660132

italia@guldmann.com

Assistenza clienti: areatecnica@guldmann.com