



Umlagerungstuch TENCEL®

Antibakterielles und temperaturreguliertes Umlagerungstuch – zum Heben und Umlagern von Benutzern mit besonders empfindlicher Haut.

Das TENCEL®-Umlagerungstuch von Guldmann eignet sich ideal zum Drehen sowie für Transfers und Umlagerungen des Benutzers im Bett und kann unter dem liegenden oder sitzenden Benutzer verbleiben.

Dieses Umlagerungstuch besteht aus einer Mischung aus Polyester und TENCEL®. TENCEL® ist ein organisches Material mit wichtigen antibakteriellen und temperaturregulierenden Eigenschaften. Die besonderen TENCEL®-Fasern sind zudem außerordentlich weich und bieten daher zusätzlichen

Komfort, zum Beispiel für Benutzer mit besonders empfindlicher Haut.

Das Tuch unterstützt den gesamten Körper und den Kopf und eignet sich daher für die unterschiedlichsten Pflegeaufgaben:

- Positionieren von Benutzern in Seitenlage
- Umlagern im Bett
- Heben des Kopfes und des Rumpfes bis zu einer halb sitzenden Position
- Transfers in Rücken- bzw. Seitenlage auf andere Flächen, z. B. Betten oder Tragen
- Drehen des Benutzers für Hygieneaufgaben
- Vollständiges Heben in Rückenlage, z. B. zum Wechseln der Bettwäsche.

Das TENCEL®-Umlagerungstuch verfügt über 8 Hebegurte – 4 auf jeder Seite des Tuchs. Die Hebegurte des Tuchs sind mit der Smart-Loop-Technologie ausgestattet, bei der eine besondere Webtechnik verwendet wird, um den Hebegurt aus einem Stück zu fertigen.

Das Umlagerungstuch kann mit allen Guldmann Deckenliftern und mobilen Personelliftern verwendet werden. Das Tuch bietet eine maximale Tragfähigkeit von 375 kg.



1



2



3



4

1. Vier Smart-Loop Hebegurte auf jeder Seite ermöglichen ein einfacheres Handhaben.

Für einen noch besseren Tragekomfort sind alle Hebegurte an der Rückseite des Umlagerungstuchs angebracht, und jeder Gurt verfügt über einen integrierten Gewichtsverteiler (Kunststoffeinsatz).

2. Dank der Farbcodierung lässt sich problemlos erkennen, wie das Tuch korrekt am Aufhängebügel anzubringen ist.

3. Durch die geraden und glatten Smart-Loop Hebegurte wird die Stolpergefahr verringert und die Schlaufen können sich nicht am Bett verfangen.

4. Elastische Bänder an jeder Ecke des Umlagerungstuchs verhindern, dass das Tuch auf der Matratze verrutscht.

Die Besonderheiten von TENCEL®

- Es wird aus Eukalyptusholz gefertigt
- Der Säureschutzmantel der Haut wird nicht angegriffen und das natürliche Vorkommen an Mikroorganismen und Bakterien auf der Haut bleibt im Gleichgewicht
- Aufgrund seiner natürlichen Materialeigenschaften sorgt es für ein optimales Klima auf der Haut und unterstützt so die Hautflora
- Im Vergleich zu anderen synthetischen Materialien kann bei TENCEL® ein verringertes Wachstum (Anzahl) von Bakterien nachgewiesen werden
- Natürliche antistatische Funktion aufgrund des Eukalyptusholzes
- Kann unter dem Benutzer verbleiben und ist somit jederzeit einsatzbereit

Merkmale des TENCEL®-Stoffes, dank denen die Unversehrtheit der Haut sichergestellt wird

- Absorbierend (hohes Absorptionsvermögen)
- Antibakteriell (intensive Hemmung von Bakterienwachstum)
- Temperaturregulierend (kann Temperatur aktiv senken)
- Weich und angenehm auf der Haut
- Kühles und trockenes Gefühl

Flächenhafte Druckerfassung und Temperaturmessung

- Keine Beeinflussung von Druck oder Temperatur durch das Vorhandensein der Unterlage
- Der Druck bleibt zwischen Körper und Oberfläche neutral, da das Umlagerungstuch unter den Patienten gelegt wird

Smart-Loop-Technologie

Die Hebegurte des Tuchs sind mit der Smart-Loop-Technologie ausgestattet, bei der eine einzigartige Webtechnik verwendet wird, um den gesamten Gurt aus einem Stück zu fertigen. Dank der Farbcodierung lässt sich problemlos erkennen, wie das Tuch korrekt am Aufhängebügel anzubringen ist. Das vereinfachte Design mit nur einem geraden und weichen Hebegurt ohne zusätzliche Schlaufen ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung. Die Schlaufen sind nahtlos in den Gurt integriert, wodurch die Stolpergefahr verringert wird.



TENCEL® – Zertifikate, Umweltzeichen und Auszeichnungen

Time to care

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann GmbH
Tel. +49 611 974 530
Fax +49 611 300 018
info@guldmann.de
www.guldmann.de