



Verkorte handleiding – Combilock



Plaats de traverserail zo dat deze op één lijn ligt met de vaste rail.



Wanneer de rails recht tegen over elkaar staan, gaat het veiligheidsslot automatisch open.



Nadat u heeft gecontroleerd of het veiligheidsslot open staat, gaat u vlak achter of voor de tillift staan. Het is nu veilig om de tillift via het Combilock en op de vaste of traverserail te verplaatsen.



Wanneer de tillift door het Combilock is gegaan, is het veilig om de traverserail te verplaatsen.

WAARSCHUWING



*Beweeg de traverserail **NIET** als de tillift in deze positie staat!*



*GH1Q mag **NOOIT** worden gebruikt in systemen met een Combilock, omdat het risico bestaat dat de tillift naar beneden valt.*



Verkorte handleiding – Combilock



1 Plaats de tillift bij de gele markering ca. 1 meter vanaf het einde van de traverserail en Combilock.



2 Plaats de gebruiker met het gezicht naar/kijkend in de lengterichting van de traverserail en op een niveau waar u kunt duwen/houden zoals op de afbeelding.

Om de rails recht tegen over elkaar te plaatsen en het Combilock in te schakelen, gaat u aan de zijkant van de gebruiker staan, zodat u haaks op de traverserail duwt of trekt.

Als het Combilock de eerste keer niet inschakelt, verplaats dan de traverserail ca. ½ tot 1 meter afstand van de Combilock rail en probeer het opnieuw.



3 Wanneer het Combilock is ingeschakeld, gaat u achter de gebruiker staan en duwt u de tillift in de lengterichting door het Combilock. De gebruiker kijkt nog steeds in de lengterichting van de traverserail.