




SE..... Guldmann lyftselar - Rengöring och desinfektion..... 2

Manual – vers. 2.00

CE

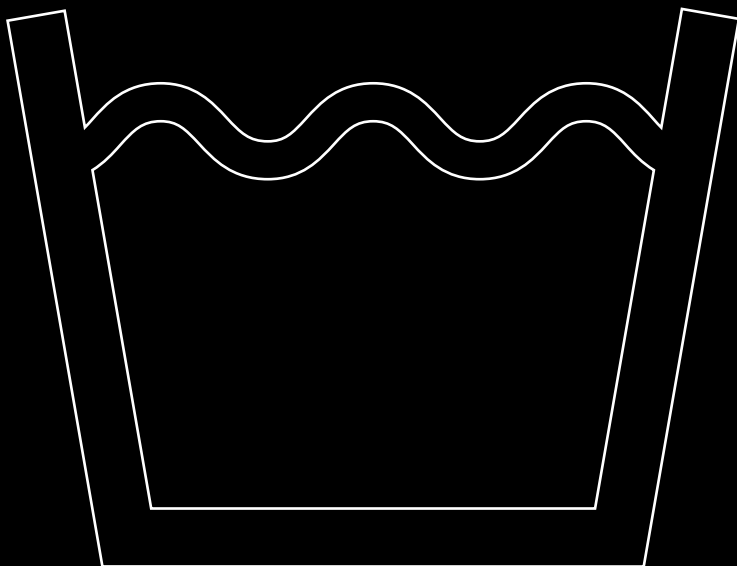

Guldmann™

Guldmanns återanvändbara/tvättbara lyftselar är avsedda att användas av en enskild person i taget. För att säkerställa infektionskontroll måste selarna rengöras – när de är synligt smutsiga och/eller efter att personen inte längre behöver selen – innan samma sele används av någon annan.

Rengöringsinstruktioner finns på produktens etikett.

Om rengörings- och skötselavvisningarna inte följs gäller inte garantin och selens livslängd kan förkortas.

---

**1.01****Rengöring**

Normal tvätt vid angiven temperatur



Använd inte blekmedel



Torktumla vid låg temperatur, max. 60° C.



Får ej strykas

---

**1.02****Desinfektion**

Guldmann rekommenderar termisk desinfektion som den säkraste metoden för att rengöra lyftselar. För att uppnå effektiv termisk desinfektion ska selen tvättas under följande tids- och temperaturförhållanden:

- Rekommendationen är att göra en sköljning av selen i kallt vatten före tvätt i varmt vatten, eftersom högre temperaturer kan fixera mörka fläckar där selen är smutsig.
- Tvättprogram med 10 minuters varaktighet vid 80 °C med ett godkänt tvättmedel med neutralt pH-värde.

**(National Infection Hygiene Guidelines (NIR))**

<https://hygiejne.ssi.dk/-/media/arkiv/subsites/infekshygiejne/retningslinjer/nir/nir-desinfektion.pdf?la=da>

**(Centers for Disease Control and Prevention (CDC))**

[https://www.cdc.gov/healthcare-associated-infections/hcp/cleaning-global/appendix-d.html?CDC\\_AAref\\_Val=https://www.cdc.gov/hai/prevent/resource-limited/laundry.html](https://www.cdc.gov/healthcare-associated-infections/hcp/cleaning-global/appendix-d.html?CDC_AAref_Val=https://www.cdc.gov/hai/prevent/resource-limited/laundry.html)

Om selen har några icke-porösa plastdetaljer, använd desinfektionsdukar med upp till 85 % isopropanol, eller en fuktig trasa med varmt vatten och ett desinfektionsmedel, t.ex. en klorlösning upp till 1500 ppm.

Efter tvätt och innan selen används, kontrollera om den har slitage eller skador.

Överväg att ta selen ur bruk om något av följande tillstånd upptäcks:

1. Kemiska eller frätande skador
2. Smältning eller förkolning av någon del av selen
3. Skador som hål, revor eller punkteringar
4. Trasiga eller slitna stygn
5. Saknad, oläslig eller ofullständig seletikett
6. Knutar på någon del av selen
7. Slitage/skav
8. Andra synliga skador som ger tvivel om selens hållbarhet

För mer detaljerade riktlinjer och en checklista för seleinspektion, se selemanualen eller [www.guldmann.com](http://www.guldmann.com).

**Exempel på defekta selar:**



*Trasiga sömmar*



*Knutar*



*Skadad/fransat material*



*Smältning/förkolning*

| Time to care |

**V. Guldmann A/S**  
Huvudkontor:  
Tel. +45 8741 3100  
info@guldmann.com  
www.guldmann.com

**Guldmann Sverige AB**  
Tel. +46 0322 55290  
info@guldmann.se  
www.guldmann.se