

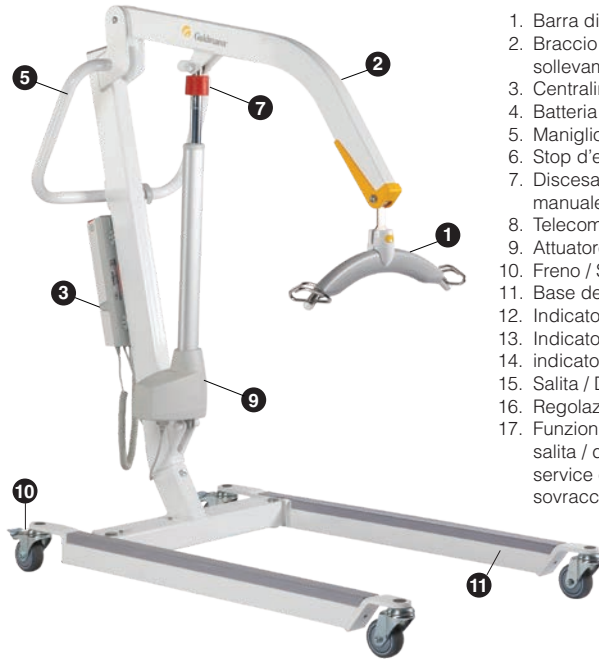


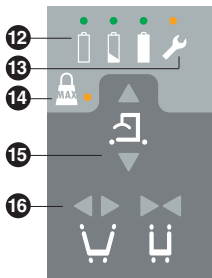

## Guida rapida - GL5.2 Sollevatore mobile

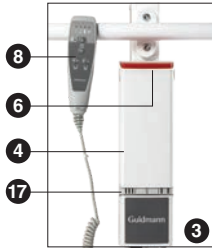

1. Barra di presa
2. Braccio di sollevamento
3. Centralina di controllo
4. Batteria
5. Maniglione di spinta
6. Stop d'emergenza
7. Discesa di emergenza manuale (opzionale)
8. Telecomando
9. Attuatore
10. Freno / Sblocco
11. Base del Telaio
12. Indicatore batteria
13. Indicatore Service
14. Indicatore sovraccarico
15. Salita / Discesa
16. Regolazione della base: salita / discesa, batteria, service o indicatore sovraccarico
17. Funzioni di emergenza: salita / discesa, batteria, service o indicatore sovraccarico

### Elenco controlli a cura dell'operatore prima dell'utilizzo

- Verificare che le ruote del sollevatore si muovano liberamente.
- Azionare i freni (10) per verificare che funzionino
- Sollevare ed abbassare il braccio di sollevamento attraverso il pulsante di controllo (15) sul telecomando (8).
- Verificare che la base si apra e chiuda correttamente (16) con il telecomando (8).
- Verificare le funzioni di emergenza salita / discesa premendo il pulsante (17) sulla centralina di controllo (3). Verificare le funzioni manuali girando la manopola (7) in direzione della freccia.
- Per resettare lo stop d'emergenza, togliere la batteria spingendo i pulsanti sul lato della stessa,

estrarre la batteria e reinserirla nuovamente nella corretta posizione. Come da fotografia alla pagina seguente.

- Assicurarsi che la barra di presa sia libera di ruotare ed oscillare (1) e verificare che sia fermamente salda al braccio di sollevamento (2).

### Opzioni di ricarica

- Il caricabatteria è integrato nella centralina di controllo – inserire il cavo di rete nella presa di corrente.
- Quando l'alimentatore è inserito, la luce verde sulla centralina di controllo si accende.
- Il diodo verde sulla control box si illumina durante la ricarica. Quando la carica è completa si illuminano 3 diodi verdi.



Spingere il pulsante grigio.



Estrarre.



Riposizionare correttamente.

## Indicatori luminosi e avvisi audio

Stato	Spie luminose	Segnali acustici	Possibili segnali GL5.2			
			Su	Giù	Apertura della gamba	Abbassamento di emergenza
<b>Telecomando</b>						
Livello batteria 75-100%	3 luci verdi		x	x	x	x
Livello batteria 50-75%	2 luci verdi		x	x	x	x
Livello batteria < 50%	1 luce verde		x	x	x	x
Livello basso critico batteria, due cicli rimasti	1 gialla verde	Bip alla pressione del pulsante	x	x	x	x
Guasto sul sollevatore	Giallo. Si accende durante l'utilizzo e rimane accesa per due minuti successivi		x	x	x	x
Sovraccarico	Giallo. Lampeggia 3 volte + si accende per 10 secondi			x		x
<b>Scatola dei comandi</b>						
Caricatore	Verde - lampeggia					
Caricato	Verde					

## Pulizia quotidiana e manutenzione

Pulire con un panno umido e un detergente che non sia troppo aggressivo né che contenga alcool. Vedere manuale.





Scansiona il codice per il manuale utente del GL5.2.

## Accessori

### Barra di presa

Posizionare l'imbragatura nei ganci. Dopo il sollevamento assicurarsi che la cinghia dell'imbragatura si mantenga in posizione.

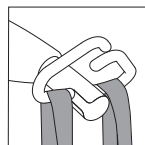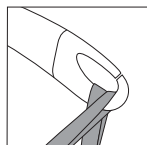

| Time to care |

**Per contattare Guldmann rivolgersi a:**

Ufficio vendite: +39 0521 660132

italia@guldmann.com

Assistenza clienti: areatecnica@guldmann.com