



V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
Fax +45 8741 3131
info@guldmann.com
www.guldmann.com



Bloqueo de la grúa

El bloqueo de la grúa añade una nueva prestación a las múltiples posibilidades de aplicación que ofrece la grúa de techo Guldmann, además de las funciones de subida y bajada.

El bloqueo de la grúa permite fijar la grúa o el riel transversal en una posición específica del sistema de raíles que cubre la sala.

El bloqueo de la grúa está compuesto por tres pequeños bloques: uno situado en conexión con la grúa de techo en el riel transversal y los otros dos situados en los rieles paralelos (uno en cada riel).

Un sistema, múltiples prestaciones

- La activación de los bloqueos de los rieles paralelos permite bloquear el movimiento lateral del riel transversal, que desde ese momento funcionará como un monoriel fijo. La grúa se podrá seguir moviendo hacia delante por el riel transversal para facilitar, por ejemplo, el desarrollo de ejercicios de movilidad en el sistema.
- La activación exclusiva del bloqueo conectado con el módulo de elevación permite desplazar el riel transversal sin que la grúa se desplace lateralmente.
- La activación de los tres bloques permite fijar totalmente la grúa en una posición específica, por ejemplo, para el desarrollo de ejercicios de rehabilitación en cama.

Esta fijación de la posición permite utilizar la grúa con fines de rehabilitación y ejercitación de pacientes postrados en cama o con movilidad.

Fácil de usar

El bloqueo de la grúa se acciona mediante un emisor por infrarrojos y basta con pulsar un botón para definir la configuración deseada. Cuando es necesario restablecer el sistema para el desarrollo de tareas de elevación y traslado, solo hay que pulsar el botón de restablecimiento para que los bloqueos se desactiven.

Transfer
Treatment
Training

| Time to care |