









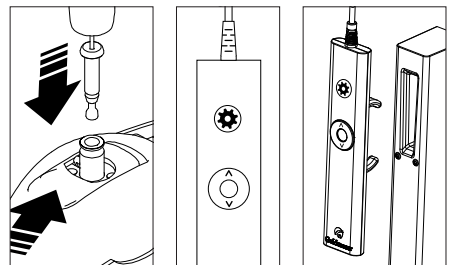




Guía rápida – GH1 F

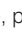- La grúa de techo se enciende pulsando uno de los botones del mando.
- Si la grúa no se enciende, puede deberse a que se ha activado el dispositivo de parada de emergencia.
- Sujete el anclaje del carro de transporte con el cordón al mecanismo de bloqueo situado en la parte superior de la grúa. Pulse el botón  en la parte superior del mando. El botón se iluminará cuando esté en modo de instalación. Para activar la instalación, pulse brevemente en . Espere hasta que se escuche un pitido largo y continuo que confirma que la instalación ha finalizado. Cuando el GH1 F esté bloqueado en el carro de transporte, pulse  de nuevo para detener el modo de instalación. La grúa de techo ahora se puede utilizar para levantar mediante  y .
- Para la desinstalación de la grúa, seleccione el  y pulse brevemente el  para activar. Espere hasta que el cordón esté completamente extendido antes de soltar el anclaje de la grúa. Pulse  de nuevo para completar el modo de desinstalación.
- La grúa se puede recargar insertando el mando en la estación de carga situada en el carro

de transporte. El mando siempre debe estar insertado en la estación de carga cuando no se utilice. La fuente de alimentación debe estar conectada y encendida.

- La capacidad de carga máxima de la grúa estará indicada en la propia grúa, por ejemplo, 255 kg. Tenga en cuenta que el sistema de raíles o el arnés pueden tener una capacidad de carga inferior. No se debe superar la capacidad de carga más baja.
- Para más información, consulte el manual de usuario del GH1 F.



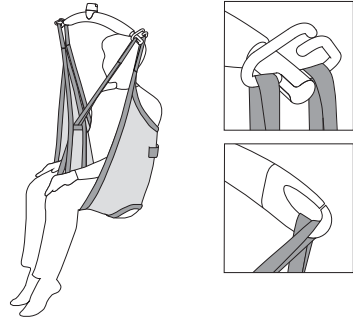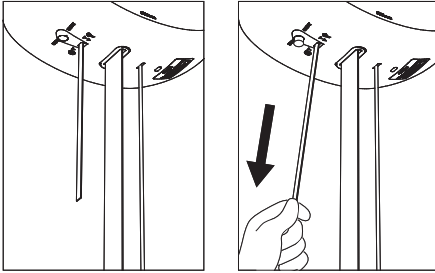

Funciones de seguridad

Parada de emergencia

- Tire una vez de la correa roja. Se debe utilizar solo en casos de emergencia, cuando sea necesario detener la grúa de forma inmediata.
- Si se activa la parada de emergencia, solo funcionará el dispositivo de descenso de emergencia de la grúa.
- Desactive la parada de emergencia pulsando el botón «stop» (botón amarillo) de la grúa. A continuación, pulse dos veces uno de los botones de la unidad de mando a distancia.

Dispositivo de descenso de emergencia

Esto se activa tirando prolongadamente de la correa roja. Utilizar solo en caso de emergencia. Esta función permite bajar al paciente cuando la grúa deja de funcionar.



Escanee este código para consultar el manual del usuario y toda la información relacionada con el uso del GH1 F.

Accesorios

Percha de elevación

Coloque las correas del arnés en los ganchos. Compruebe que las correas se hayan sujetado correctamente a la percha.

Arnés de elevación

Recomendamos utilizar un arnés de elevación con dos o cuatro puntos de sujeción para fijar el arnés a la percha de elevación. El arnés debe corresponder siempre con la capacidad de carga de la grúa. Utilice siempre productos con marcado CE individual.

Si tiene alguna duda acerca del uso de un arnés de elevación, póngase en contacto con su distribuidor.

Limpeza y mantenimiento diarios

Limpe con un paño húmedo y detergente común. No utilice ácidos fuertes, bases o alcohol durante la limpieza. Consulte el manual del usuario.

| Time to care |

Goldmann Iberia SL

Tel. +34 6828 75331

info@guldmann.es

www.guldmann.es