



Guía rápida - Combi-lock



1

Coloque el raíl transversal de manera que quede alineado con el raíl del Combi-lock.



2

Cuando los raíles están alineados, las puertas de seguridad se abren automáticamente.



3

Después de comprobar que el cierre de seguridad está accionado, póngase justo detrás o delante de la grúa. Ahora es seguro maniobrar la grúa a través del Combi-lock y sobre el raíl fijo o transversal.



4

Cuando la grúa haya atravesado el Combi-lock, el raíl transversal podrá moverse con total seguridad.

ADVERTENCIA



¡NO mueva el raíl transversal cuando la grúa esté en esta posición!



NUNCA se debe utilizar el GH1Q en sistemas con Combi-lock, ya que existe el riesgo de que la grúa se caiga.



Guía rápida - Combi-lock



1 Coloque la grúa en la marca amarilla, aproximadamente a 1 metro del extremo del raíl transversal y del Combi-lock.



2 Coloque al usuario mirando hacia el raíl transversal y a una altura que le permita empujar/ sujetar como se muestra en la imagen.

Para alinear los raíles y enganchar el Combi-lock, póngase al lado del usuario para empujar o tirar perpendicularmente sobre el raíl transversal.

Si el Combi-lock no se engancha a la primera, aleje el raíl transversal entre medio metro y un metro del raíl del Combi-lock y vuelva a intentarlo.



3 Cuando el Combi-lock esté enganchado, colóquese detrás del usuario y empuje longitudinalmente el raíl transversal a través del Combi-lock. El usuario sigue de cara/mirando en sentido longitudinal al raíl transversal.