



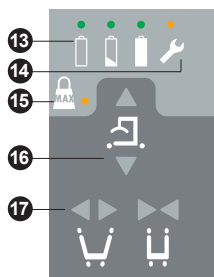

Guía rápida - Bipedestadora GLS5.2

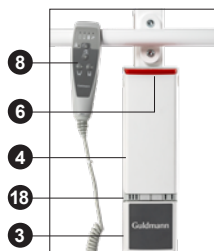

1. Ganchos de sujeción para los arneses
2. Brazo de elevación
3. Caja de control
4. Batería
5. Palanca de empuje
6. Parada de emergencia
7. Descenso de emergencia manual
8. Mando
9. Actuador
10. Rueda giratoria con freno trasero
11. Reposapiés
12. Almohadilla para la rodilla y perillas de ajuste x 2
13. Indicador de batería
14. Indicador de servicio
15. Indicador de sobrecarga
16. Brazo de elevación arriba/abajo
17. Ajuste de base
18. Función de emergencia: arriba/abajo, indicador de batería, de servicio y de sobrecarga


Lista de comprobación previa a la utilización para operadores

- Asegúrese de que las ruedas giratorias de la bipedestadora se mueven sin problemas.
- Accione los frenos (10) para comprobar que funcionan correctamente.
- Suba y baje el brazo de elevación (2) mediante los botones del mando (8).
- Compruebe que el ajuste de la base (17) se abre y se cierra mediante el mando (8).
- Compruebe el funcionamiento de emergencia arriba/abajo presionando los botones (17) de la caja de control (3). Compruebe la función manual girando la perilla (7) en la dirección de la flecha.
- Para restablecer la parada de emergencia, quite la batería pulsando los botones situados a los lados de la pisma, sáquela y vuelva a colocarla en su sitio. Vea las imágenes en la siguiente página.

- Libere las perillas de ajuste de la almohadilla para la rodilla x 2 (12). La almohadilla debe moverse hacia arriba/abajo y deslizarse hacia dentro/afuera; apriete para fijarla.
- Asegúrese de que el reposapiés (11) esté seguro y limpio.

Opciones de carga

- Cargador integrado en la caja de control: enchufe el cable de red a la toma de corriente.
- Una vez enchufado, se enciende la luz LED verde de la caja de control.
- El diodo verde de la caja de control (3) se ilumina durante la carga. Cuando esté completamente cargado, se iluminan 3 diodos verdes.

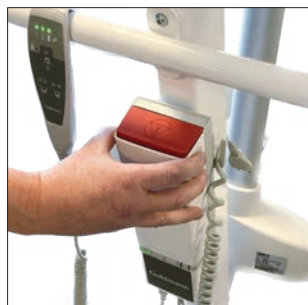

Presione los botones grises.



Tire hacia afuera.



Presione de nuevo hasta su sitio.

Luces indicadoras y avisos acústicos

Estado	Luces indicadoras	Señales acústicas	Posibles señales de la GLS5.2			
			Arriba	Abajo	Separación de las patas	Descenso de emergencia
Mando						
Batería cargada al 75-100 %	3 luces verdes		x	x	x	x
Batería cargada al 50-75 %	2 luces verdes		x	x	x	x
Batería cargada <50 %	1 luz verde		x	x	x	x
Batería baja crítica, quedan dos ciclos	1 luz amarilla	Pitidos al activar el botón	x	x	x	x
Mantenimiento de la grúa de suelo	Amarillo. Se enciende durante el uso y 2 minutos después		x	x	x	x
Sobrecarga	Amarillo. Parpadea 3 veces + se enciende durante 10 segundos			x		x
Caja de control						
Cargador	Verde - parpadea					
Cargado	Verde					

Limpieza y mantenimiento diarios

Limpie con un paño húmedo y detergente común. No utilice ácidos fuertes, bases o alcohol durante la limpieza. Consulte el manual del usuario.






Escanee esto para consultar el manual del usuario y demás información sobre el uso de la GLS5.2.

Accesorios

Percha de elevación

Coloque la correa del arnés en los ganchos. Tras levantar, compruebe que la correa se mantenga en su posición.

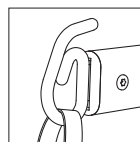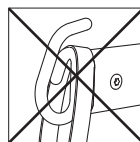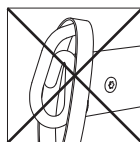

| Time to care |

Guldmann Iberia SLU

Tel: +34 682 875 331

info@guldmann.com