



Guida Rapida - Combi-lock



1
Posiziona il binario traverso in modo che sia allineato con il binario Combi-lock.



2
Quando i binari sono allineati, le porte di sicurezza si apriranno automaticamente.



3
Dopo aver verificato che il dispositivo di sicurezza sia stato attivato, posizionati dietro o davanti il sollevatore. Adesso il sollevatore è sicuro da manovrare attraverso il Combi Lock, e sopra il binario fisso o traverso.



4
Quando il sollevatore è passato attraverso il Combi-lock, è sicuro muovere il binario traverso.

ATTENZIONE



NON muovere il binario traverso quando il sollevatore è in questa posizione!



GH1Q non dovrebbe **MAI** essere usato in sistemi con Combi-lock, poiché c'è il rischio che il sollevatore cada.



Guida Rapida - Combi-lock



1 Posiziona il sollevatore nella linea gialla, a un metro dalla fine del binario trasverso e dal Combi-lock.



2 Posiziona l'utente in modo che guardi lungo il binario trasverso, ad un livello in cui puoi spingere o tenere come mostrato nell'immagine.

Per allineare i binari ed azionare il Combi-lock, posizionati di lato all'utente, in modo da poter spingere o tirare perpendicolarmente sul binario trasverso.

Se il Combi-lock non si attiva la prima volta, sposta il binario trasverso da circa $\frac{1}{2}$ a 1 metro lontano dal binario del Combi-lock e riprova.



3 Quando il Combi-lock è stato attivato, posizionati sotto l'utente e spingi lungo il binario trasverso attraverso il Combi-lock. L'utente rimane ancora posizionato in modo da guardare lungo il binario trasverso.