



GTP1

Plataforma de transferencia

Transferencia en posición de pie fácil, cómoda y segura

La plataforma de transferencia GTP1 de Guldmann es un dispositivo móvil manual que facilita el traslado de usuarios que pueden mantenerse de pie y que son semiautónomos.

Al participar activamente en la transferencia, el usuario es capaz de utilizar y entrenar su propia función muscular y su equilibrio.

La plataforma es robusta y estable, lo que garantiza un buen apoyo y seguridad durante las transferencias breves en posición de pie. En caso de ser necesario, se puede utilizar un cinturón de transferencia para proporcionar un apoyo adicional durante la transferencia en posición de pie.

Entre las tareas comunes de traslado y manipulación que se realizan con la plataforma de transferencia se incluyen:

- Traslados desde y hacia el inodoro o la silla de inodoro
- Traslados desde y hacia una silla de ducha
- Práctica de levantarse o sentarse (movilización)
- Mantenimiento de una postura de pie (movilización)

Manejo fácil y seguro

La plataforma de transferencia es fácil de mover y ocupa muy poco espacio. Se puede empujar, tirar de ella y rotar alrededor de su propio eje. Esto hace que sea muy fácil de maniobrar, incluso con espacio limitado.

Flexible y eficaz

La plataforma de transferencia de Guldmann puede utilizarse en todos los entornos sanitarios y garantiza una transferencia en bipedestación activa y segura para el usuario, además de un entorno laboral seguro y ergonómico para el personal auxiliar.

La plataforma es fácil de transportar de una ubicación a otra, por ejemplo, en el caso de los cuidados a domicilio, ya que las partes superior e inferior se pueden separar fácilmente y transportar por separado.

Capacidad de carga máxima: 175 kg.



Detalles del producto



Asa multiagarre

El asa, que cuenta con una superficie suave y antideslizante, tiene un diseño ergonómico con agarres curvos en tres niveles. De este modo, tanto el usuario como la persona que le asiste pueden elegir el mejor lugar al que agarrarse, y las tres asas pueden utilizarse a modo de «escalera» cuando el usuario se levanta o se sienta.



Baja altura de entrada

La placa base está fabricada en aluminio moldeado y cuenta con una superficie antideslizante. La altura de entrada de tan solo 30 mm y su forma permiten colocarla muy cerca de una silla de ruedas o un inodoro, por ejemplo. La baja altura de entrada facilita que el usuario apoye los pies en la placa base.



Soporte para la parte inferior de la pierna ajustable

El soporte para las piernas ajustable cuenta con un suave acolchado que ofrece una sujeción cómoda y adecuada al usuario. Para lograr el máximo apoyo, el soporte para la parte inferior de la pierna se puede ajustar en altura y rotar (inclinarse) de forma fácil y rápida gracias a la función de agarre fácil.



Freno central

El freno de pie se encuentra en el centro y bloquea ambas ruedas al mismo tiempo. El freno está codificado por colores para indicar claramente si está bloqueado o no.



Cinturón de transferencia

Para una mayor sujeción y seguridad durante la transferencia. Se coloca alrededor de la parte superior del cuerpo del usuario y se fija al agarre central del asa multiagarre de la plataforma de transferencia. **NOTA:** el cinturón de transferencia no debe utilizarse para elevar al usuario a una posición de pie.



Preparada para el reciclaje

Las superficies lisas y su sólida construcción hacen que la plataforma de transferencia GTP1 sea fácil de limpiar y apta para el reciclaje. La plataforma de transferencia está preparada para facilitar la separación y el reciclaje de los materiales al final de su vida útil.

Time to care

V. Guldmann A/S
Tel. +45 8741 3100
info@guldmann.com
www.guldmann.com

Guldmann Iberia SL
Tel. +34 6828 75331
info@guldmann.es
www.guldmann.es