



Guía rápida – Báscula de clase III para GH3+




Cómo restablecer la báscula


Encienda la grúa de techo presionando cualquier tecla en el mando de la grúa de techo.




Seleccione «menú» para elegir la función de pesaje. Al seleccionar funciones de visualización, utilice los botones de función debajo de la pantalla.

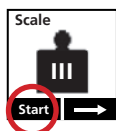


Cuando el icono de «Báscula de clase III» se muestra en la pantalla, presione «Iniciar»

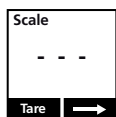


Tres guiones parpadearán hasta que la báscula encuentre su punto cero.

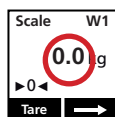

Cuando la pantalla muestre «0.0», ya puede colocar el arnés en la percha de elevación. Deje que la percha y el arnés cuelguen libremente y recuerde no tirar del cable del mando. Esto afectará al pesaje.

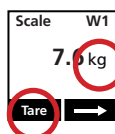

Cuando se muestre «kg» en la pantalla, la báscula estará lista para ser restablecida a cero. Esto se hace seleccionando «Tara»

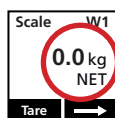

El valor «00» se vuelve a mostrar en la pantalla y el símbolo «net» aparece debajo del símbolo «kg». La báscula está ahora lista para pesar al paciente.






Pesaje

Asegúrese de que la báscula esté restablecida a cero correctamente antes de pesar (ver sección anterior).



Retire el arnés de elevación de la percha.

Una vez que el usuario ha sido colocado en el arnés de elevación, colóquelo de nuevo en la percha de elevación. Levante al paciente.

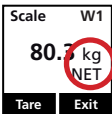

El peso correcto es el que se puede leer cuando el símbolo «kg» aparece en la pantalla.



Cuando el pesaje haya terminado, presione «Salir» para volver al menú principal.


Áreas de pesaje




La báscula de clase III funciona en dos áreas de pesaje: W1 y W2. El área de pesaje específica se muestra en la pantalla.

W1 muestra pesos de hasta 200 kg con una incertidumbre de 100 g, mientras que W2 muestra pesos superiores a 200 kg con una incertidumbre de 200 g.


Notificaciones de error

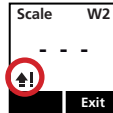

La báscula está sobrecargada.

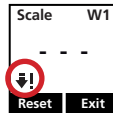

La báscula está por debajo del valor mínimo de lectura posible.

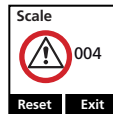

Hay un error en la báscula. Requiere un técnico de servicio.



Escanee este código para consultar el manual del usuario y toda la información relacionada con el uso de la GH3.