



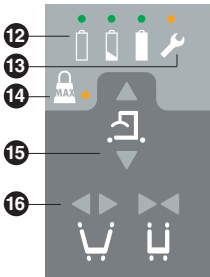

Guía rápida - GL5.2 Grúa de suelo

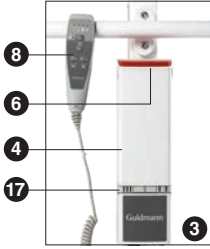

1. Percha
2. Brazo de elevación
3. Caja de control
4. Batería
5. Palanca de empuje
6. Parada de emergencia
7. Descenso de emergencia manual (opcional)
8. Mando con cable
9. Actuador de elevación
10. Liberador/freno
11. Pata del chasis
12. Indicador de batería
13. Indicador de servicio
14. Indicador de sobrecarga
15. Brazo de elevación arriba/abajo
16. Ajuste de base
17. Función de emergencia: arriba/abajo, indicador de batería, de servicio y de sobrecarga

Lista de comprobación previa a la utilización para operadores

- Asegúrese de que las ruedas giratorias de la grúa de suelo se mueven sin problemas.
- Accione los frenos (10) para comprobar que funcionan correctamente.
- Suba y baje el brazo de elevación (2) mediante los botones de control (15) del mando con cable (8).
- Compruebe que el ajuste de la base (16) se abre y se cierra mediante el mando con cable (8).
- Compruebe la función de emergencia arriba/abajo presionando los botones (17) de la caja de control (3). Compruebe la función manual girando la perilla (7) en la dirección de la flecha.
- Para restablecer la parada de emergencia, quite la batería pulsando los botones situados a los lados de la misma, sáquela y vuelva a colocarla en su sitio. Vea las imágenes en la siguiente página.
- Asegúrese de que la barra de la percha puede rotar y bascular libremente (1) y compruebe que está firmemente sujeta al brazo de elevación (2).

Opciones de carga

- Cargador integrado en la caja de control: enchufe el cable de red a la toma de corriente.
- Una vez enchufado, se enciende la luz LED verde de la caja de control.
- El diodo verde de la caja de control (3) se ilumina durante la carga. Cuando esté completamente cargado, se iluminan 3 diodos verdes.



Presione los botones grises.



Tire hacia afuera.



Empuje de nuevo en su sitio.

Luces indicadoras y avisos acústicos

Estado	Luces indicadoras	Señales acústicas	Posibles señales del GL5.2			
			Arriba	Abajo	Separación de las patas	Descenso de emergencia
Mando a distancia						
Batería cargada al 75-100 %	3 luces verdes		x	x	x	x
Batería cargada al 50-75 %	2 luces verdes		x	x	x	x
Batería cargada <50 %	1 luz verde		x	x	x	x
Batería baja crítica, quedan dos ciclos	1 luz amarilla	Pitidos al activar el botón	x	x	x	x
Mantenimiento de la grúa de suelo	Amarillo. Se enciende durante el uso y 2 minutos después		x	x	x	x
Sobrecarga	Amarillo. Parpadea 3 veces + se enciende durante 10 segundos			x		x
Caja de control						
Cargador	Verde - parpadea					
Cargado	Verde					

Limpieza y mantenimiento diarios

Limpie con un paño húmedo y detergente común. No utilice ácidos fuertes, bases o alcohol durante la limpieza. Consulte el manual del usuario.





Escanee este código para consultar el manual del usuario y toda la información relacionada con el uso de la GL5.2.

Accesorios

Percha de elevación

Coloque la correa del arnés en los ganchos. Al levantar, compruebe que la correa se mantenga en su posición.

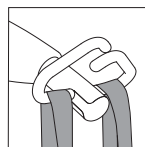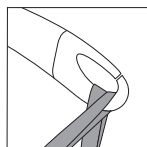

| Time to care |

Guldmann Iberia SL
Tel. +34 6828 75331
info@guldmann.es
www.guldmann.es